


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО ИИИ «Огонек»

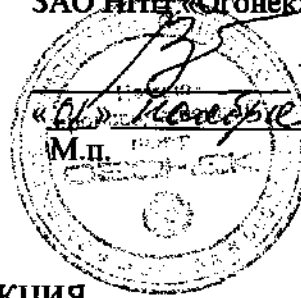

Чугунов В.В.

2010г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Тутор на коленный сустав для детей ТН4-11Д (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется в реабилитационном периоде после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени; при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, гемартрозах, артрозо-артритах, бурситах, синовитах, менисцитах, умеренной варусной и вальгусной девиации голени, рекурвации коленного сустава, параличах мышц нижней конечности различной этиологии. Предназначен для иммобилизации коленного сустава с фиксацией 2/3 бедра и 2/3 голени у детей.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор выполнен из нормофлекса пассивного.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция. Не применяется при выраженной сгибательной контрактуре коленного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Достигается иммобилизация коленного сустава с фиксацией 2/3 бедра и 2/3 голени. Металлические шины профилируются с учетом антропометрических особенностей. Система крепления позволяет регулировать степень компрессии.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

Чулкова М.М.