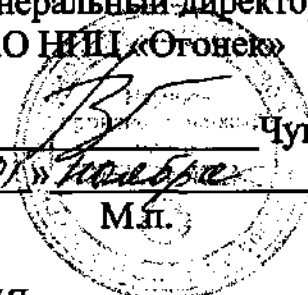


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИИ «Огонек»

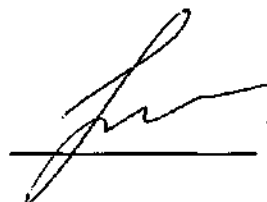

Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010 г.
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Бандаж ортопедический на поясничный отдел позвоночника БН2-07
(далее – бандаж).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для дополнительной фиксации позвоночника и паравертебральных мягких тканей при недостаточной функции мышц, поддерживающих позвоночный столб.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикот". Фиксация бандажа осуществляется посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Необходимость стабильной фиксации, локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, абдоминальные грыжи.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается на тело или хлопчатобумажное белье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается легкая фиксация поясничного отдела позвоночника, тепловое и микромассажное действие на подлежащие ткани, улучшающее их трофику и уменьшающее болевой синдром. Длительное ношение бандажа не приводит к гипотрофии мышц.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.