

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

Чугунов В.В.
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Бандаж ортопедический на плечевой сустав БНб-04 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для фиксации и ограничения движения в суставе в период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, при вывихах плеча.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж состоит из наплечника и мягкой манжеты плеча, соединенных между собой посредством застежки текстильной ворсовой типа "Контакт", а также ремней, пришитых к наплечнику. Фиксация бандажа на теле пациента осуществляется с помощью застежки "Контакт". Детали бандажа изготовлены из ткани "Трикор" и "Нормофлекс".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, необходимость жесткой фиксации, стабильной иммобилизации. Осторожно применять при лимфостазах и венозной недостаточности.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело или поверх одежды и фиксируется на теле пациента с помощью застежки "Контакт".
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Благодаря бандажным свойствам ткани «Нормофлекс», бандаж обеспечивает отводящую поддержку плеча с разгрузкой связочно-мышечного аппарата и ограничением крайних положений движения (обычно вызывающих боль) без сковывания движений средней амплитуды. Обеспечивается легкая компрессия области плечевого сустава с прогревом подлежащих тканей и области надплечья отраженным теплом, что способствует улучшению трофики и снятию болевого синдрома.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.