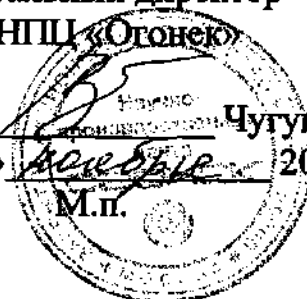


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

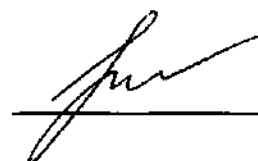

Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010г.
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Тутор на голеностопный сустав функциональный (правый, левый) ТН0-20
(далее – тутор).**

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при ДЦП, последствиях ОНМК, последствиях повреждения спинного мозга, после оперативного и консервативного лечения косолапости, угрозе формирования эквино-варусной или вальгусной деформации стопы. Возможно применение вместо гипсовой или U-образной лангеты.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор изготовлен из ламинированного полипропилена, шлевки - из полиамида, застежки - текстильные ворсовые типа “Контакт”.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Фиксированные деформации стопы и голеностопного сустава; травматические повреждения, требующие стабильной фиксации.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается на хлопчатобумажный чулок.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается фиксация стопы в нейтральном положении при ходьбе. Благодаря конструктивным особенностям, сохраняется движение в плюснефаланговых суставах, что обеспечивает больному возможность переката и заднего толчка при опоре на стопу. Применяется с обычной обувью с каблуком до 2 см. Срок применения изделия - от 2 до 12 часов в сутки. Возможна индивидуальная подгонка путем обрезки и термической доблоковки.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.