

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПФ «Огонек»

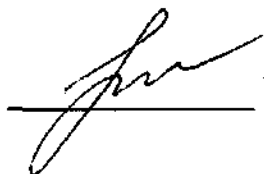

Чугунов В.В.
2010 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Стельки ортопедические индивидуальные мужские ОС-ИМ (далее – стельки).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Стельки обеспечивают правильную статическую установку стопы, компенсирование дефектов подошвенной поверхности стопы при профилактике и лечении плоскостопия (продольного, поперечного, комбинированного) и сопутствующих заболеваний. Стельки показаны при плоскостопии продольном, поперечном, комбинированном, ортостатическом, посттравматическом.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Стельки изготавливаются из пластины резино-тканевой «Трикор», каплена, клея резинового, пластиката, пенополиэтилена.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженные деформации стопы, индивидуальная непереносимость.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки вкладывается в обувь, имеющую жесткий задник, закрытую носочную часть. Стельки предназначены для повседневного использования.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается правильная установка стопы и поддержка сводов стопы.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Стельки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 15 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению. Мыть стельки следует раствором детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.