


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ИМА-Свонек»

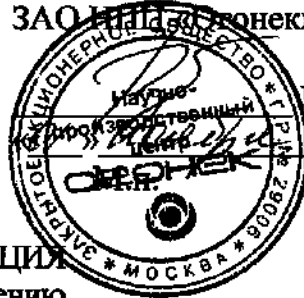

Чугунов В.В.
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Головодержатель полужесткий КР0-83 (далее – головодержатель).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Головодержатель предназначен для фиксации и частичной разгрузки шейного отдела позвоночника. Головодержатель показан при повреждении и заболеваниях мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, кривошеи миогенной, дерматогенной, десмогенной, нейрогенной, анталгической этиологии, для этапной коррекции и удержания в положении гиперкоррекции. Может применяться при реабилитации после травм позвоночного столба в шейном отделе и при нестабильности позвоночника (ревматологические заболевания, остеохондроз, остеопороз) с неврологическими и экстравазальными нарушениями.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Головодержатель состоит из передней части, выполненной из подчелюстного и нагрудного элементов, шарнирно соединенных между собой, и спино-затылочной части. Грудной и подчелюстной элемент передней части соединяются между собой с помощью трех, вертикально расположенных застежек текстильных ворсовых типа «Контакт». Передняя часть соединяется со спинозатылочной с помощью застежки текстильной ворсовой типа «Контакт», закрепленной на грудном элементе заклепкой с шайбой. Регулировка по длине шеи, а так же флексии и экстензии, производится за счет взаимного перемещения верхнего и нижнего передних узлов с последующей фиксацией 3-х застежек из ленты «ВЕЛКРО». Регулировка по объему шеи производится за счет взаимного перемещения передних и затылочных узлов с последующей фиксацией ленты «ВЕЛКРО».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, повреждения мягких тканей. Не применяется при необходимости жесткой фиксации шейного отдела позвоночника.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажную прокладку. Регулировка по длине шеи, а также флексии и экстензии, производится за счет взаимного перемещения верхнего и нижнего передних узлов с последующей фиксацией 3-х застежек из ленты "ВЕЛКРО". Регулировка по объему шеи производится за счет взаимного перемещения передних и затылочных узлов с последующей фиксацией ленты "ВЕЛКРО".
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель обеспечивает иммобилизацию и частичную разгрузку шейного отдела позвоночника с возможностью коррекции по высоте и девиации головы во фронтальной плоскости. За счет коррекции по высоте возможна регулируемая флекссионная или экстензионная установка.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Головодержатель должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70 %. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению головодержателем. Головодержатель не должен подвергаться воздействию растворителей щелочей и красящих веществ. Мыть головодержатель следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

 Чулкова М.М.