

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Отеок»



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Головодержатель жесткой фиксации КР0-84 (далее - головодержатель).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Головодержатель показан при умеренных нарушениях функции мышц и связочного аппарата шейного отдела позвоночника, остеохондрозе, спондилезе, динамической нестабильности шейного отдела позвоночника, миозитах и неврологических болях различной этиологии.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Головодержатель изготовлен из трикотажного полотна, пенополиуретана, застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Нестабильность шейного отдела позвоночника с угрозой повреждения спинного мозга, локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажную прокладку.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель обеспечивает фронтальную и сагиттальную фиксацию шейного отдела позвоночника с возможностью регулирования флексии и экстензии. Необходимое положение достигается с помощью регулировочного механизма и при необходимости фиксируется дополнительными опорами. Регулировка по высоте достигается с помощью вкладного пелота.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Головодержатель должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70 %. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению головодержателем. Головодержатель не должен подвергаться воздействию растворителей щелочей и красящих веществ. Мыть головодержатель следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.