

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Орбис»



Чугунов В.В.
2010г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Головодержатель тракционный КР0-85 (далее – головодержатель).


- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Головодержатель предназначен для иммобилизации и тракции шейного отдела позвоночника по оси. Головодержатель показан в раннем восстановительном периоде после перелома-вывихов в области шейного отдела позвоночника при необходимости жесткой фиксации и дозированной, падающей, вертикальной тракции его по оси. При неосложненных переломах может использоваться непосредственно после травмы. При осложненных переломах применяется после предварительного лечения стационарным вытяжением и последующего удержания в корригированном положении гипсовой повязкой. Головодержатель также показан непосредственно после оперативной коррекции врожденной мышечной кривошеи с целью разгрузки и иммобилизации шейного отдела при выраженных остеохондрозах и (или) нестабильности, ревматоидных артритах с выраженным болевым синдромом.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Верхний (подчелюстной), нижний (грудной) элементы передней части, задняя (спино-затылочная) часть изготовлены из полистирола. Вкладыш передней части изготовлен из пенополиэтилена, шарнирный узел флексии и экстензии - из полиамида. Четыре корригирующие винтовые устройства изготовлены из полипропилена, шлевки и заклепки - из полиамида. Фиксация осуществляется с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт".
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Головодержатель временно противопоказано при осложненных переломах-вывихах на период, требующий стационарного вытяжения или длительной стабильной иммобилизации шейного отдела несъемной гипсовой повязкой, а также при острых воспалительных процессах и контактных дерматитах кожных покровов на период до купирования процесса. Головодержатель противопоказан при необходимости стабилизации



пораженного отдела оперативным путем или жесткой его фиксации и полной разгрузки с опорой на более обширную область надплечий (т.е. когда показано изготовление индивидуального изделия аналогичной конструкции по гипсовому позитиву).

4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажную прокладку. Соединение переднего и заднего узлов обеспечивается застежками-контакт "ВЕЛКРО" с учетом антропометрических данных пациента. Регулировочные штанги, за счет частичного вывертывания фиксирующих винтов, относительного перемещения частей штанг и последующего вворачивания винтов с учетом углублений на штангах, позволяют регулировать положение флексии или экстензии, а также distraction шейных позвонков. Не рекомендуется вворачивать фиксирующие винты с фасонными головками каким-либо инструментом.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Головодержатель обеспечивает стабильную фиксацию шейного отдела позвоночника с возможностью одновременного осуществления его осевой (вертикальной) тракции и частичной разгрузки.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Головодержатель должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70 %. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению головодержателем. Головодержатель не должен подвергаться воздействию растворителей щелочей и красящих веществ. Мыть головодержатель следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

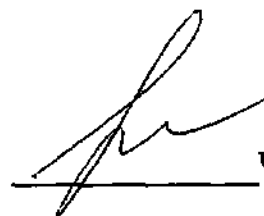

Чулкова М.М.