

Общество с ограниченной ответственностью

" Завод Металлической и Медицинской Мебели "

Россия 127521, / г.Москва

12-й проезд Марьиной рощи, д.8

тел. 619-26-38

факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Стол массажный

МММ-303

ТУ-9452-006-32466639-2002

Назначение:

Стол массажный МММ-303 предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений.

Стол массажный предназначен для проведения физиотерапевтических и диагностических мероприятий с применением электрооборудования.

Технические данные:


Габариты:

длина	1850 мм
ширина	615 мм
высота	545 мм
масса не более	30 кг
допустимая нагрузка не более	120 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00671

срок действия по 05.10.2010г.

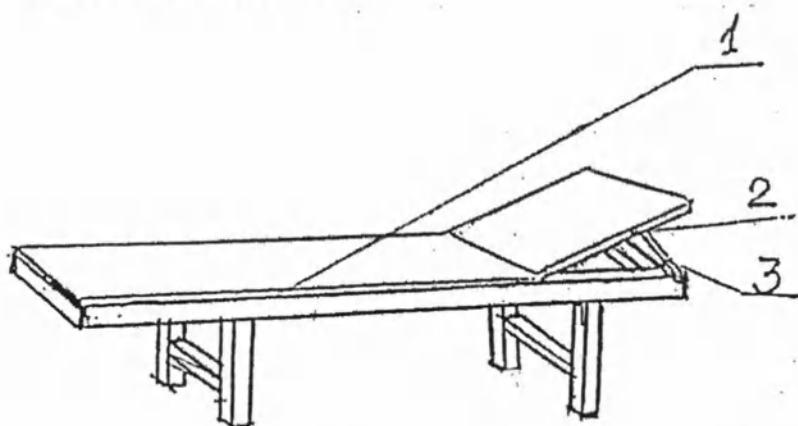

Комплект поставки:

1. Каркас(поз.3) - 1 шт.
2. Щит(поз.1) - 1 шт.
3. Подголовник(поз.2) - 1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

В конструкции стола предусмотрен подъём головной части.

Приподнять подголовник(поз.2), повернуть упор и установить его в фиксатор, как показано на рисунке.

Хранение:

Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей,вызывающих коррозию.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости стол подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок стола составляет 18 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

" Завод Металлической и Медицинской Мебели "

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31**

ПАСПОРТ

Стол массажный

МММ-311

ТУ-9452-006-32466639-2002

Назначение:

Стол массажный МММ-311 предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений.

Стол массажный применяется при проведении массажей, медицинских осмотров и перевязках.


Технические данные:

Габариты:

длина	1977 мм
ширина	700 мм
высота	748 мм
масса не более	32 кг
допустимая нагрузка не более	120 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00671
срок действия по 05.10.2010г.

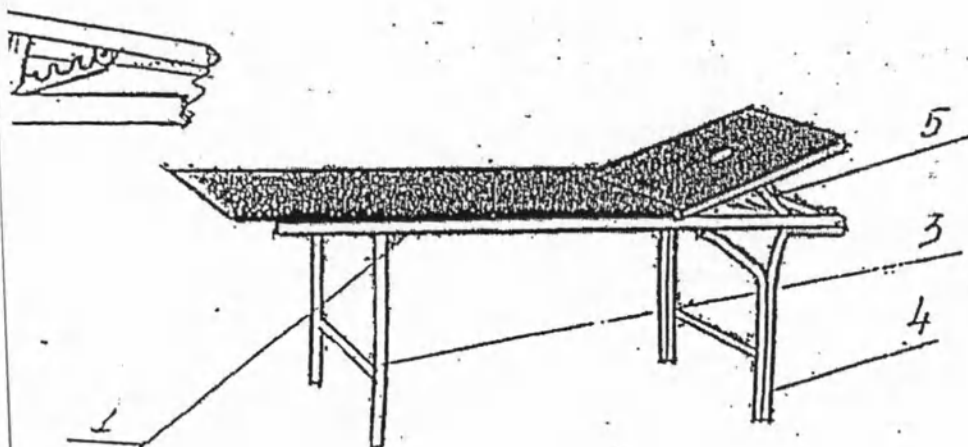

Комплект поставки:

1. Рама в сборе(поз.1) - 1 шт.
2. Ножки передние(поз.4) - 1 шт.
3. Ножки задние(поз.3) - 1 шт.
4. Подъёмный механизм(поз.5) - 1 шт.
5. Гайка М8 - 8шт.
6. Шайба - 8шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Установить ножки на шпильки и закрепить гайками.

В конструкции стола предусмотрен подъём головной части.

Приподнять подголовник на нужный угол, установить упор и его в фиксатор, как показано на рисунке.

Хранение:

Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части стола имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости стол подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок стола составляет 18 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

" Завод Металлической и Медицинской Мебели"

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31**

ПАСПОРТ

Стол массажный

МММ 302

ТУ-9452-006-32466639-2002

Назначение:

Стол массажный **МММ-302** предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений.

Стол массажный предназначен для проведения физиотерапевтических и диагностических мероприятий с применением электрооборудования.

Технические данные:


Габариты:

длина	1850 мм
ширина	610 мм
высота	507 мм
масса не более	30 кг
допустимая нагрузка не более	120 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00671

срок действия по 05.10.2010г.

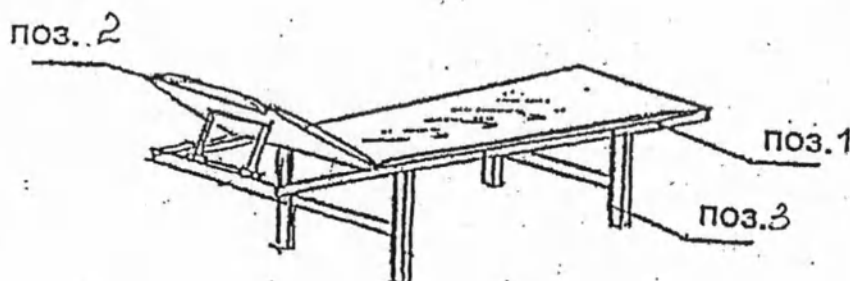

Комплект поставки:

1. Щит (поз.1) - 1шт.
2. Подголовник(поз.2) - 1шт.
3. Каркас(поз.3) - 1шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

В конструкции стола предусмотрен подъём головной части.

Приподнять подголовник на нужный угол, установить упор в фиксатор, как показано на рисунке.

Хранение:

Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части стола имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости стол подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689

(тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок стола составляет 18 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью
<ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ>

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

Стол массажный

МММ-301

ТУ-9452-006-32466639-2002

Назначение:

Стол массажный МММ-301 предназначен для оснащения лечебно-профилактических учреждений.


Стол массажный применяется при проведении массажей, медицинских осмотров и перевязках.

Технические данные:

Габариты:

длина	1950 мм
ширина	700 мм
высота	750 мм
масса не более	30 кг
допустимая нагрузка не более	120 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

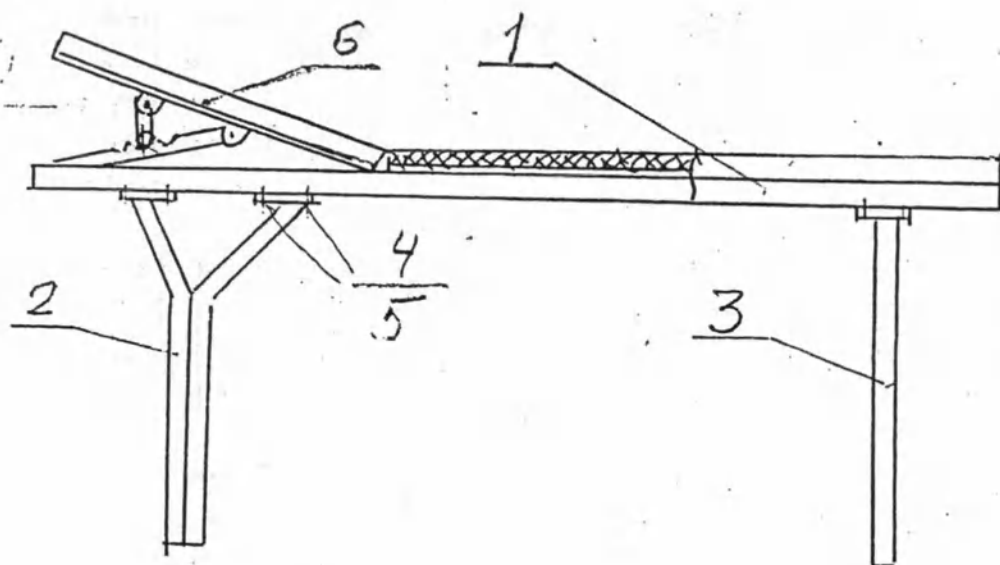

Комплект поставки:

1. Рама в сборе(поз.1) - 1шт.
2. Ножки передние(поз.2) - 1шт.
3. Шожки задние(поз.3) - 1шт.
4. Гайка М8 - 8шт.
5. Шайба - 8шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Установить ножки нашпильки(поз.4) и закрепить гайками(поз.5)

В конструкции стола предусмотрен подъём головной части.

Приподнять подголовник на нужный угол, установить упор и его в фиксатор, как показано на рисунке.

Хранение:

Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей,вызывающих коррозию.

Все металлические части стола имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости стол подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).