

Общество с ограниченной ответственностью

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Стул

МММ - 413

ТУ-9452-008-32466639-2002

Назначение:

Стул **МММ-413** предназначен для самообслуживания и ухода за инвалидами в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.


Применяется для оснащения лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Технические данные:

Габариты:

длина	560 мм
ширина	560 мм
высота со спинкой	520 мм
масса не более	5,8 кг
допустимая нагрузка не более	120 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

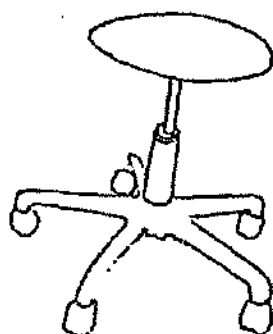

Стул выпускается в двух исполнениях:

- тканевая обивка.
- обивка из искусственной кожи.

Стульям во втором исполнении допускается проведение дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689(тампоны должны быть отжаты).

Хранение:

Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от - 50 до + 40 С в относительной влажности воздуха 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

Закрытое Акционерное Общество

<ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ>

**Россия 127521,г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 219-26-38,факс, 218-51-31**

ПАСПОРТ

Стул с подлокотниками

МММ-436 *Mellell - 446*
ТУ-9452-008-32466639-2002

Назначение

Стул МММ-446 с подлокотниками предназначен для самообслуживания и ухода за инвалидами в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.

Применяется для оснащения лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Технические данные:

Габариты:

длина	510мм
ширина	640мм
высота со спинкой	860мм
масса не более	7,5 кг
допустимая нагрузка не более	120кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет



Стул выпускается в двух исполнениях :

5. Тканевая обивка.
6. Обивка из искусственной кожи.

Для стульев в исполнении 2 допускается проведение дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или тампоном смоченным 1% хлорамида по ТУ6-014669387-1688 (тампоны должны быть отжаты).

Хранение:

Стул должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части стула имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок : стул составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения Покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются Продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК