


Головка ML7 не соединяется с Моторизованным Ручным Держателем: Проверьте Головку ML7 и Моторизованный Ручной Держатель на предмет мусора, способного помешать Быстрому Соединению двух сцепливающих компонентов. Если засорение не обнаружено, замените компоненты, чтобы определить, какой неисправен.

Вакуумное Кольцо

Головка ML7 натывается на Вакуумное Кольцо: Удалите Спиральный Привод из Вакуумного Кольца путем выкручивания гайки, расположенной на конце Спирального Привода. A wrench is supplied as an accessory for this purpose. Для этой цели поставляется гаечный ключ.

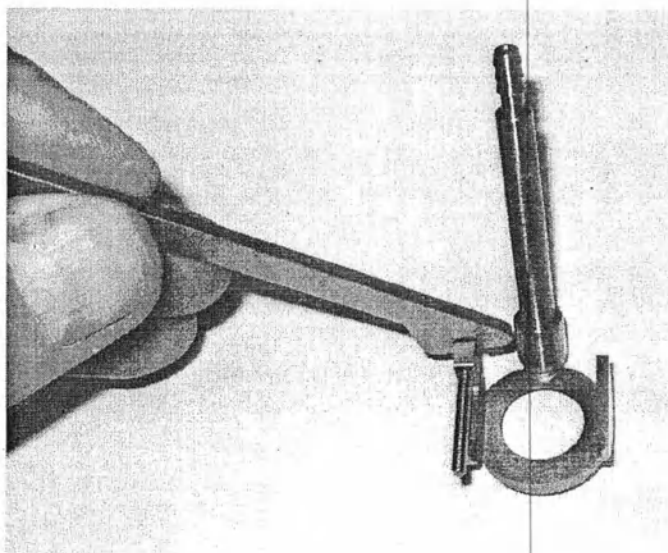

Вакуум более чем 425 мм рт. столба с незакупоренным кольцом: Если вакуум по показаниям приборов на передней панели более 450 мм рт. столба, при присоединенных и незакупоренных Вакуумном Кольце и, наиболее вероятно, что имеет место блокировка Вакуумного Кольца. В первую очередь, вытащите Вакуумное Кольцо из Вакуумной Рукоятки. Если уровень вакуума уменьшилась, значит блокировка может быть в Вакуумном Кольце. Если уровень вакуума остался неизменным, вытащите Вакуумную Рукоятку из трубы для определения уменьшения значения уровня вакуума. Если