


УТВЕРЖДАЮ

Директор СП "ФреБор" ООО

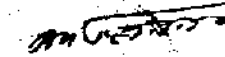

В.И. Бургун

«28»

05

2007


ЗОНДЫ ЖЕЛУДОЧНЫЕ
однократного применения

ТУ ВУ 600012098.013-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
6000120983Ж - 2007

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

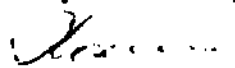


Г.Л. Комар

«28»

2007 г.

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

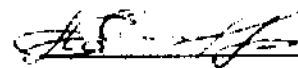


Е.Н. Лебецкая

« 1 »

2007 г.

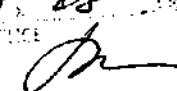

КОПИЯ ВЕРНА
«28» 08 2009


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зонды желудочные однократного применения
ТУ ВУ 600012098.013-2007

НАЗНАЧЕНИЕ: Зонд желудочный предназначен для:

- желудочного зондирования с лечебной целью;
- желудочного зондирования с диагностической целью;
- энтерального питания.

ФОРМА ВЫПУСКА: Зонд желудочный выпускается в потребительской таре, состоящей из пленки термоформусмой и бумаги газопроницаемой. Детали зонда изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Состоит из воронкообразной насадки и трубки с боковыми отверстиями. Размерный ряд: СН 8; СН 10; СН 12; СН 14; СН 16; СН 18; СН 20; СН 22; СН 25; СН 28; СН 30; СН 32; СН 35.

Зонд желудочный стерилен, апирогенен, нетоксичен.
Стерилизован окисью этилена.
Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте целостность потребительской тары и срок годности зонда желудочного.
2. Вскройте потребительскую тару и извлеките зонд желудочный.
3. Измерить расстояние от резца зуба до пупка или же ширина ладони больного – длина зонда для входа в желудок.
4. Поместить зонд на корень языка и продвигать его вслед глотательным движениям.
5. Убедиться, что зонд в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через зонд 20 мл воздуха).
6. Продвинуть зонд еще на 7–10 см в желудок.
7. По окончании процедуры извлечь зонд через салфетку смоченную дезраствором.
8. Обработать и утилизировать зонд в установленном порядке.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!


РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-технолог
СП «ФреБор» ООО



Соболевский С.М.

КОПИЯ БУМАГА
08.08.2009

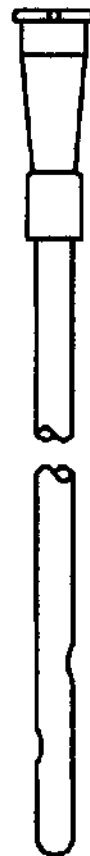



В настоящее время докумен-
ты проинформировано и
скреплено печатью
и печатью