


УТВЕРЖДАЮ

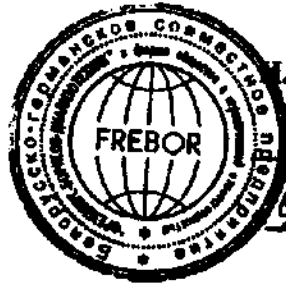

И.о. директора СП "ФреБор" ООО

В.И. Ковалев В.И. Ковалев

« 9 » 10 2006 г.

КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ
однократного применения

ТУ ВУ 600012098.011-2006

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
600012098КУ - 2006

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

Г.Л. Комар Г.Л. Комар

« 11 » 09 2006 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

Е.Н. Лебецкая Е.Н. Лебецкая

« » 2006 г.



КОПИЯ ВЕРНА
« 12 » 08 2009 г.
подпись *Р*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
катетера урологического однократного применения
ТУ ВУ 600012098.011-2006

НАЗНАЧЕНИЕ: Катетер урологический предназначен для:

- сбора мочи на микробактериологическое исследование, если по каким-то причинам это не может быть осуществлено по общим правилам;
- для ретроградного введения контрастного вещества (цистоуретерография);
- для эвакуации мочи при острой задержке;
- с целью промывания мочевого пузыря и введения в него лекарственных препаратов.

ФОРМА ВЫПУСКА: Катетер урологический выпускается в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали катетера изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Состоит из воронкообразной насадки и трубки с боковыми отверстиями.

Катетер урологический стерилен, апирогенен, нетоксичен.

Стерилизован окисью этилена.

Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подготовка к катетеризации включает обработку рук медицинской сестры теплой водой с мылом и щетками, спиртом, йодом и наружных половых органов больного. Больной (или больная) лежит на спине, ноги полусогнуты в коленях и разведены. Между ног ставят лоток для сбора мочи (мочеприемник).
2. Проверьте целостность потребительской тары и срок годности катетера урологического.
3. Вскройте потребительскую тару и извлеките катетер урологический.
4. Перед введением катетера женщине производят подмывание, при необходимости, спринцевание, обработку ватным шариком с раствором сулемы, фурацилина. Затем пинцетом берут катетер, Смазывают его стерильным вазелином и вводят в мочеиспускательный канал. Появление мочи из катетера указывает, что он находится в мочевом пузыре.

5. Введение катетера мужчине производится следующим образом. Сестра берет левой рукой половой член за головку и протирает ее, отверстие уретры и крайнюю плоть ватой, смоченной раствором борной кислоты. Затем раскрывает отверстие мочеиспускательного канала и пинцетом или с помощью стерильной марлевой салфетки вводят катетер (предварительно смазанный вазелином) в уретру. Как только катетер достигнет мочевого пузыря, появляется моча. Извлекать катетер следует немного раньше, чем выйдет моча, чтобы оставшаяся порция мочи, вытекая, промыла мочеиспускательный канал.


Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

Инженер-технолог
СП «ФреБор» ООО



Талако И.И.

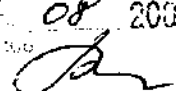

КОПИЯ ВЕРНА
12 08 2009




В настоящее время
процессуально и сфериально
нравно при нем.