

УТВЕРЖДАЮ

Директор СП "ФреБор" ООО

В.И. Бургун

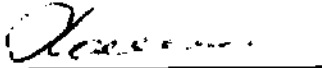
28 05 2007

КОЛПАЧОК «ЛУЕР»
однократного применения
ТУ РБ 05838972.002-99

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИСЖЕ 942312.99 ИП

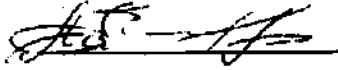
СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

 Г.Л. Комар

« 28 » « 05 » 2007 г.

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

 Е.Н. Лебецкая

« 28 » « 05 » 2007 г.



12 08 09
Рз -

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Колпачка «Луер» однократного применения

НАЗНАЧЕНИЕ:

Колпачек «Луер» используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения (канюли, катетеры периферических и центральных вен, инфузионные и кровопроводящие магистрали и других, имеющих коннектор типа «Луер»), обеспечивая их герметичность и стерильность.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Колпачок «Луер» помещен в потребительскую тару, состоящую из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Колпачок изготовлен из полимерного материала, выдержавшего токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованного для применения в медицинских изделиях.

Колпачки «Луер» в потребительской таре стерильны.

Стерилизованы окисью этилена.

Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте срок годности колпачка и целостность потребительской тары.
2. Вскройте потребительскую тару и извлеките колпачок..
3. Накрутите колпачок на коннектор «Луер» до упора.
4. Утилизация колпачка производится в установленном порядке.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

РАЗРАБОТАЛ

Инженер-технолог



И.И. Талако



Лист/листов 2/2



В настоящее время
принципиально и серьезно
негативно же
Пн