

УТВЕРЖДАЮ



Директор СП "ФреБор" ООО

В.И. Бургун
В.И. Бургун

2007

ЗАЖИМ ПУПОВИНЫ
однократного применения
ТУ ВУ 600012098.015-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИС 6000120983П - 2006

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

Г.Л. Комар

Г.Л. Комар

"14" 12 2007

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

Е.Н. Лебецкая

Е.Н. Лебецкая

"14" 12 2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

зажима пуповины однократного применения

TU BY 600012098.015-2007

Назначение:

Зажим пуповины однократного применения предназначен для пережатия пуповины после рождения ребенка.

Область применения:

Лечебные учреждения и служба скорой медицинской помощи.


Форма выпуска:

Зажим пуповины выпускается в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Изготовлен из полипропилена, выдержавшего токсикологические испытания в установленном порядке.

Стерилен, апирогенен, нетоксичен.

Стерилизован окисью этилена.

Срок годности – 3 года.

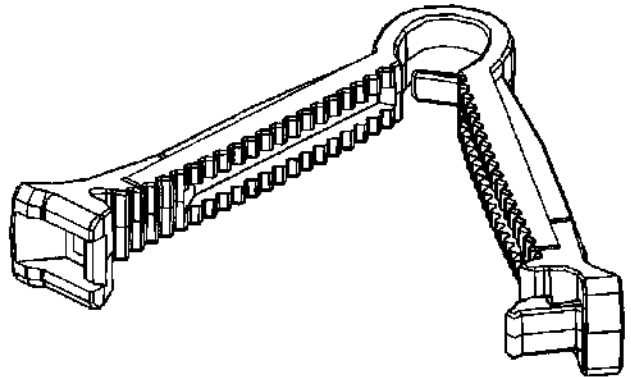

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить два зажима в индивидуальной упаковке. Проверить целостность потребительской тары и срок годности зажимов.

Через 2 – 3 минуты после рождения (пока пуповина не перестанет пульсировать) необходимо вскрыть потребительскую тару и извлечь зажимы. На расстоянии 10 – 15 см от пупочного кольца новорожденного накладывается один зажим с полным охватом пуповины и сжимается до защелкивания замка (характерный щелчок), через несколько сантиметров – другой. Пуповину между зажимами смазывают 96% спиртом и перерезают стерильными ножницами. Место разреза смазывают 5% настойкой йода.


Температура хранения зажима от плюс 5 до плюс 40 °С.

Температура эксплуатации зажима от плюс 18 до плюс 42 °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ.

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТО
СП «Фребор» ООО

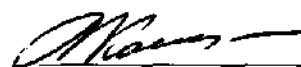 М.М.Колончук

