

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра
Здравоохранения
Республики Беларусь



В.Е.Шевчук

2009 г.

МОЧЕПРИЕМНИКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

однократного применения

ТУ ВУ 600012098.020-2009

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСЖЕ 943184.03 ИП

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора РУП
«Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»



С.И.Зинченко

2009 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный врач Минской областной
клинической больницы



Ю.Н. Ладутко

« 12 »

2009 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «4-я городская клини-
ческая больница»



А.А.Троянов

« 13 »

2009 г.

РАЗРАБОТАНО

Директор ГУП «Фребор» ООО



И.И.Тургун

« 09 »

2009 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «БСМП»



В.И. Сиренко

« 20 »

2009 г.

КОПИЯ ВЕРНА

« 1 » 07 2011 г.

подпись

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемников полимерных
ТУ ВУ 600012098.020-2009

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мочеприемники полимерные предназначены для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Мочеприемники полимерные выпускаются в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой, а также в групповой упаковке нестерильными. Детали мочеприемников изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Мочеприемники полимерные, в потребительской таре, стерильны.


Стерилизованы окисью этилена.

Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте срок годности мочеприемника полимерного и целостность потребительской тары.
2. Вскройте потребительскую тару и извлеките мочеприемник полимерный.
3. Снимите защитный колпачок 1 со штуцера 2.
4. Подсоедините штуцер к катетеру урологическому или нефростоме.
5. Подвесить мочеприемник полимерный при помощи узла крепления 3.
6. Проконтролировать свободное поступление жидкости в мочеприемник.
7. По окончании процедуры отсоединить штуцер.
8. Обработать и утилизировать мочеприемник в установленном порядке.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

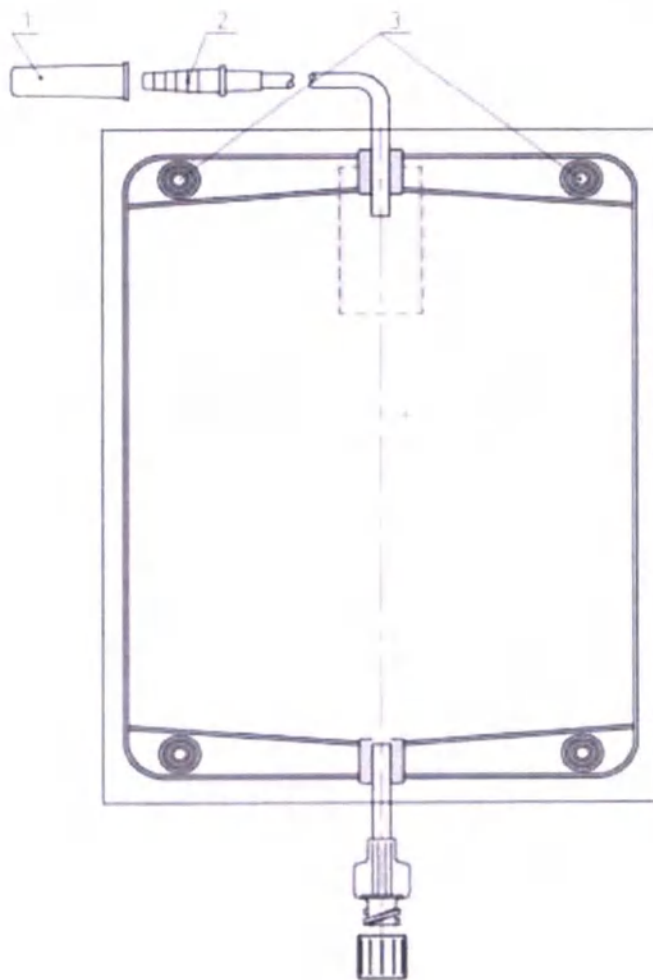

РАЗРАБОТАЛ

Инженер-технолог

С.А. Мороз

В настоящем документе
прошнуровано и пронуме-
ровано 2 (два) листа

Инженер-
нолог П. Г. И. Ев-
сейчик

