


УТВЕРЖДАЮ

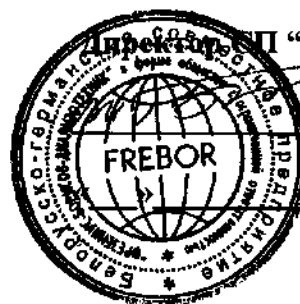

Директор СП "ФреБор" ООО

В.И.Бургун

2006 г.

НАКОНЕЧНИК КЛИЗМЕННЫЙ
однократного применения
ТУ ВУ 600012098.012-2006

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
05838972.01НК - 2006

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

Г.Л.Комар

« » 2006 г.

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

Е.Н.Лебецкая

«14» 12 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
наконечника клизменного однократного применения
ТУ ВУ 600012098.012-2006

НАЗНАЧЕНИЕ: Наконечник клизменный подсоединяется к кружка Эсмарха и предназначен для промывания и спринцевания полостей организма человека.

ФОРМА ВЫПУСКА Наконечник клизменный выпускаются в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали наконечника изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Состоит из переходника и непосредственно наконечника.

Наконечник клизменный стерильный, апиrogenный, нетоксичный.
Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подготовить больного и кружку Эсмарха к процедуре.
2. Проверить целостность потребительской тары и срок годности наконечника клизменного.
3. Вскрыть потребительскую тару и извлечь наконечник клизменный.
4. Наконечник смазать вазелином и соединить с переходником.
5. Соедините переходник с трубкой кружки Эсмарха.
6. Открыть кран (зажим) на трубке кружки Эсмарха, выпустить немного жидкости и воздуха, затем закрыть кран (зажим).
7. Далее проводить процедуру согласно инструкции по постановке клизмы.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ !

РАЗРАБОТАЛИ:

Начальник ПТО
СП "ФреБор" ООО



М.М.Колончук

Инженер-технолог ПТО
СП "ФреБор" ООО



И.И.Талако

