

УТВЕРЖДАЮ

Директор СП "ФреБор" ООО

И.Б. Бургун
"13" _____ г.



**КАТЕТЕРЫ АСПИРАЦИОННЫЕ
однократного применения**

ТУ ВУ 600012098.017-2008

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИСЖЕ 942272.02 ИП**

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по техническим
вопросам СП "ФреБор" ООО

Г.Л. Комар
_____ Г.Л. Комар

«13» 02 _____ 2009 г.

Руководитель службы контроля
качества СП "ФреБор" ООО

Е.Н. Лебецкая
_____ Е.Н. Лебецкая

«13» 02 _____ 2009 г.



КОПИЯ ВЕРНА
08.08.2009
Р

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Катетеры аспирационные однократного применения
ТУ ВУ 600012098.017-2008

НАЗНАЧЕНИЕ: Катетеры аспирационные предназначены для трахеобронхиального отсасывания из легких.

ФОРМА ВЫПУСКА: Катетер аспирационный выпускается в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали катетера изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Состоит из воронкообразной насадки и трубки с боковым отверстием и атравматичным концом.

Размерный ряд: СН 8; СН 10; СН 12; СН 14; СН 16; СН 18; СН 20.

Катетер аспирационный стерилен, апиrogenен, нетоксичен.

Стерилизован окисью этилена.

Срок годности – 3 года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1. Проверьте целостность потребительской тары и срок годности катетера аспирационного.
2. Вскройте потребительскую тару и извлеките катетер аспирационный.
3. Ввести через нос или рот до уровня, требующего активной аспирации.
4. Подсоедините отсасывающее оборудование к коннектору катетера и произведите аспирацию.
5. По окончании процедуры отсоединить от отсасывающего оборудования и извлечь катетер.
6. Обработать и утилизировать катетер аспирационный в установленном порядке.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!



РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-технолог
СП «ФреБор» ООО

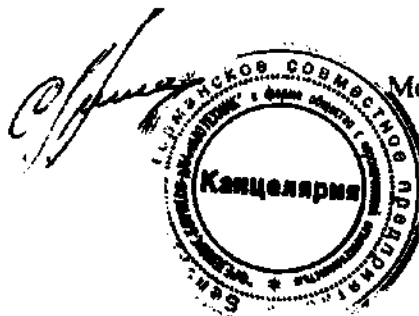

Мороз С.А.

КОПИЯ ВЕРНА
12.08.2009
10:00



В настоящей документации
проинформировано и сфигуровано
мгачно 2 (две шеста)