

Инструкция
по применению наконечников полимерных одноразовых Finntip, Labtip
для медицинских пипеток

Назначение.

Наконечники полимерные одноразовые Finntip, Labtip для медицинских пипеток производства «Термо Фишер Сайентифик» предназначены для совместного использования с пипетками при осуществлении высокоточного дозирования жидкостей в клинико-диагностических, иммунологических, санитарно-гигиенических и бактериологических лабораториях лечебных учреждений.

Основные технические характеристики.

Наконечники изготовлены из чистого полипропилена, который считается материалом свободным от контаминации и прекрасно подходит для изготовления наконечников. Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на пипетку. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе. Ровные плоские стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании.

Материал наконечников также можно подвергать автоклавированию при 121⁰С.

Подготовка к работе изделия.

1. Откройте упаковку с наконечником.
2. Убедитесь, что наконечник, который Вы будете использовать для работы, имеет гладкие и ровные края верхнего и нижнего отверстия.
3. Убедитесь, что у наконечника не наблюдается следов облоя.
4. Наденьте наконечник на дозатор. Верхний край наконечника должен плотно прилегать к дозатору.
5. Если какое-то из вышеперечисленных требований не выполняется, замените наконечник на другой и повторите процедуру заново.
6. Дальнейшая эксплуатация наконечника производится согласно инструкции на Дозатор пипеточный.

Упаковка и маркировка.

Наконечники выпускаются стерильными и нестерильными, упакованными в картонную коробку или полиэтиленовый пакет.

На упаковке указывается:

- Логотип компании-производителя.
- Название изделия.
- Каталожный номер.
- Номер серии.
- Объем наконечника.
- Название и адрес компании-производителя.
- Надпись «Сделано в Финляндии».
- Знак «для однократного применения».
- Знаки соответствия международным стандартам..

Производитель:

«Термо Фишер Сайентифик Ой», Ратастие 2, ФЛ-01620 Вантаа, Финляндия

«Thermo Fisher Scientific Oy», Ratastie 2, FL-01620 Vantaa, Finland.

Представительство в Российской Федерации:

ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Россия.

196240, г. Санкт- Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корпус 1, лит. А.

Исполнительный директор,
ЗАО "Жермо Филар Селентификс"
А. С. Шихов



Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.