

Отведите защитную заслонку и вставьте Пробирку для образца Unyvero™ в Модуль для лизирования Unyvero™ Lysator до упора.

Верните защитную заслонку назад и убедитесь, что она находится в своей первоначальной позиции и закрывает Пробирку для образца Unyvero™ полностью.

Закройте крышку Модуля для лизирования Unyvero™.

При наличии свободного отверстия как в Модуле для лизирования Unyvero™ Lysator, так и в Анализаторе Unyvero™ Analyzer, операционная система показывает всплывающие окна, предлагая лизировать следующий образец.



Рисунок 18 Требования к постановке Пробирок для образцов Unyvero™ в Модуль для лизирования Unyvero™ Lysator

ПРИМЕЧАНИЕ При открытой крышке Модуля для лизирования Unyvero™ Lysator, анализ притановится.



Рисунок 19 Установка Пробирок для образцов Unyvero™ в Модуль для лизирования Unyvero™