



МОНТАЖ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Установка сетки

- Заведите два направляющих стержня С и D в раму, затем проведите их через бока сетки.
- Затяните сетку на точках А и В.

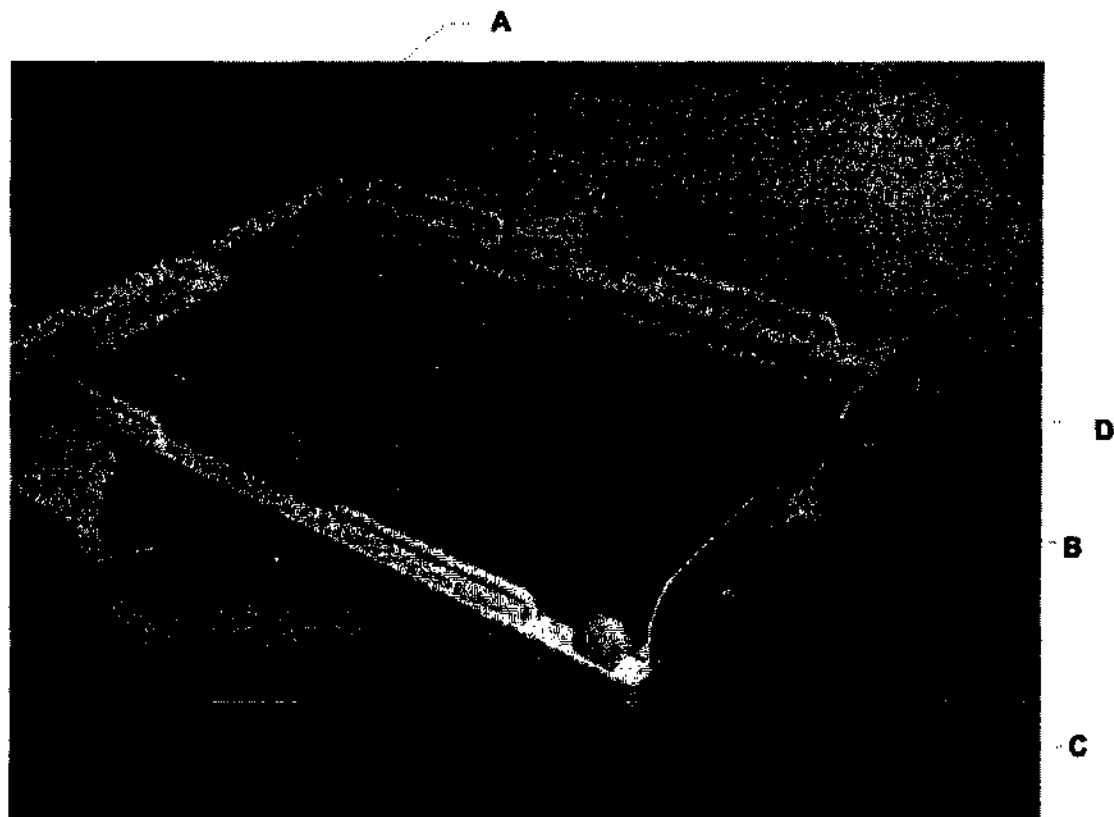

Предупреждение: Проверьте положение щелей для направляющих стержней в раме сетки.

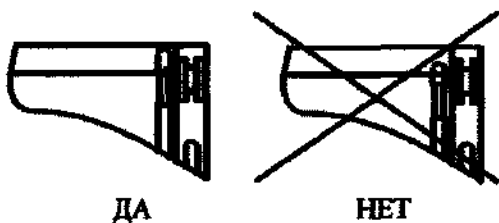

Установка рамы сетки


Держите раму в горизонтальной плоскости и сопоставьте с точками E и F по краям полос скольжения.

Продольно задвиньте раму до самого конца.


С помощью ручки заведите раму двумя руками до конца.

Убедитесь в том, что полосы скольжения функционируют, для этого нежно нажмите на раму сетки. Два стопора справа и слева должны работать безотказно.

Полосы скольжения не должны оказывать малейшего сопротивления.

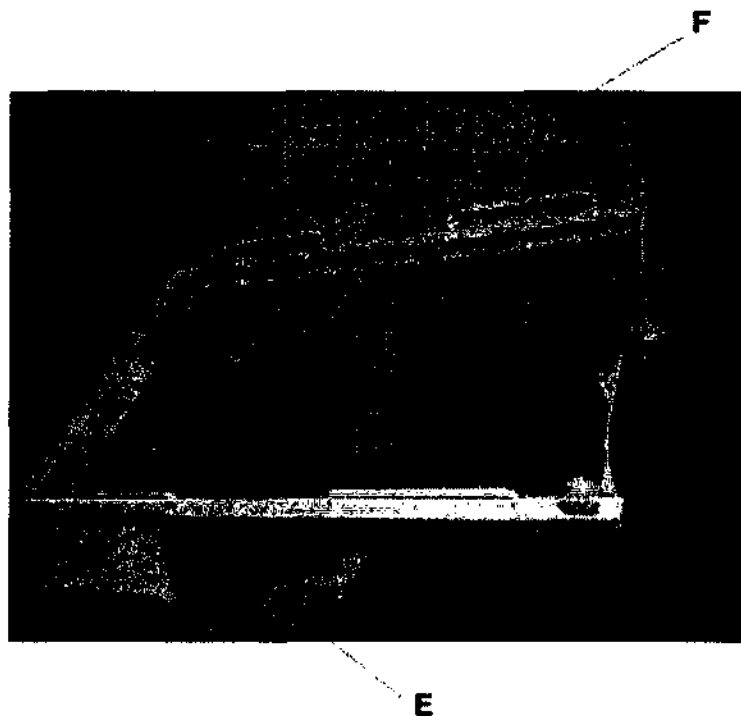

Установка защитных панелей

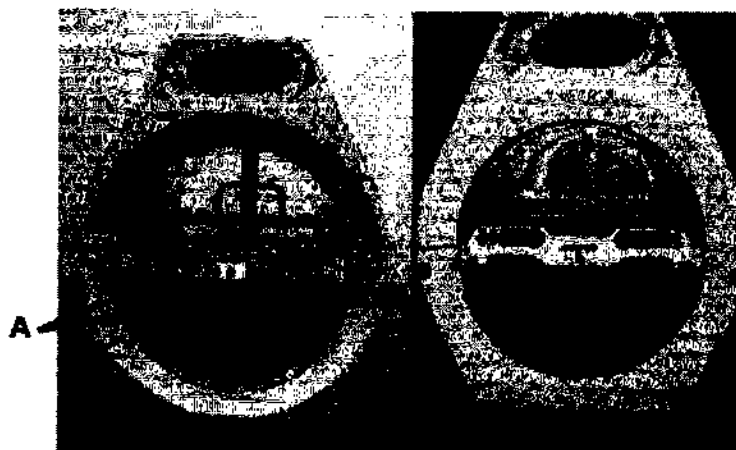

1. С помощью двух скобок установите нижнюю панель.



2. Установите верхнюю панель и вставьте две фиксирующие защелки.