

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Дина Интернешнел»

Нареш Райна



2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Система дренажа Nitex

Производства : фирмы Бикакцилар (BİCAKÇILAR), Турция

TUR set. Ipg.
T.Y.P. НАБОР

- Набор для проведения трансуретральной резекции.
- Представляет из себя Y-образный соединительный шланг с передвижными зажимами.
- Силиконовая трубка на проксимальном конце для присоединения к резектоскопу.
- Длина-225 см.
- Кат. N: 430 0001 1



URIMETER 500 TM

УРИНОМЕТР 500 TM

- Закрытая система для почасового измерения мочи.
- Представляет из себя камеру для измерения мочи, объемом 500 мл ,проводящий шланг,
- Пакет для сбора мочи емкостью 2000мл.
- Камера содержит четыре измерительных полости, гидрофобный вентиляционный фильтр.
- Точность измерения- до 50 мл.
- Проводящий шланг- длиной 120 см, с передвижным зажимом, защитой для переполнения,
- С клапаном для опорожнения всех камер одновременно.
- Пакет для сбора мочи- закрытая система, полностью исключает контакт с мочой.
- Имеет гибкие ремешки для крепления.
- Стерильный.
- Кат. N -227 1001 1.
- Запасной двухлитровый мешок для уринометра -223 0020 1, 223 1020 1.



Уринометр 500 ТМ

СТЕРИЛЬНО

Закрытая система для измерений объема мочи.

Инструкция к применению:

1. Спомощью гибких ремешков для крепления повесить уринометр вертикально.
2. Закрыть клапан для опорожнения 2. и спускной кран пакета для сбора мочи 3.
3. Соединить коннектор проводящего шланга 4. с катетером 5.
4. Проверить плотность контакта.
5. Опорожнить наполненный пакет для сбора мочи 6. и вновь закрыть клапан для опорожнения 2. открыть спускной кран пакета для сбора мочи 3. Используйте перчатки!
6. Во избежание перегибов, расположить трубку прямо.
7. Во время подключения к катетеру, взятие образцов или транспортировки пациента,- закрыть передвижной зажим 8.
8. Не располагать уринометр 500 ТМ выше уровня мочевого пузыря,

ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ: $\pm 10\%$



URINE BAG HANGER ДЕРЖАТЕЛЬ ПАКЕТА ДЛЯ МОЧЕПРИЕМНИКА

Для пакетов емкостью 1,5 и 2 литра.

Предотвращает перегибы.

Может использоваться как для круглой, так и для прямоугольной опорной рамы.



THORACENTHESIS SET

НАБОР ДЛЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ (ТОРАКОЦЕНТЕЗА).

- Закрытая система для проведения плевральной пункции
- Состоит из пакета для секрета, трубки, соединительной линии, шприца Люер и иглы.
- ПАКЕТ для секрета- емкостью 2 л, ПВХ, градуирован в мл, имеет обратный клапан для предотвращения пневмоторакса.
- ТРУБКА – длиной 90 см, устойчивая к перегибам
- СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ- длина 30 см
- Шприц Люер – лок – объемом 60 см³
- ИГЛА для плевральной пункции 16 G, тонкостенная.
- Кат. N-421 0001 1.



REDON DRAIN ДРЕНАЖ ПО РЕДОНУ

Достаточная жесткость и гибкость изделия
Атравматичный , открытый конец с мягкими закругленными краями
Крестообразная перфорация
Рентгеноконтрастная полоска
Маркировка в см
Длина- 50 см
Кат. N: 790 XX01 1
Размеры-6-18 СН



BPDS-700/2000

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ.

Стерильно

Инструкция:

1. Асептически вскрыть пакет
2. Снять колпачок с синего коннектора 1.
3. Заполнить дренажную систему стерильным раствором до метки «0».
Уровень жидкости должен хорошо заполнить нижний конец внутренней трубки.
4. Снять колпачок 2 с коннектора и соединить систему с трубками грудной полости.
5. Плотнo закрыть колпачок коннектора.
6. Дренажная емкость всегда должна быть ниже уровня грудной клетки пациента.
7. Для аспирации соединить короткий коннектор 1 с трубкой аспиратора, размером 3/8" (9,52 мм).
8. Проверить, чтобы уровень расположения пациента был ниже уровня «водяного замка».
9. После использования открыть разгрузочный порт.
 - **Не пригоден для повторного использования.**
 - **ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ: + 10%**



B-VAK DRAINAGE SYSTEM with single needle. СИСТЕМА ДЛЯ ДРЕНАЖА РАН B-VAK с одной

иглой.

Дренажная система B-VAK используется для дренажа в области операционного разреза пациента, подкожно или чрезкожно, с применением вакуума. Состоит из катетера Редона, соединительной трубки, которая присоединяется к резервуару дренажной системы. Дренаж с иглой вводится в рану, выводится через слои кожи. Игла обрезается. Дренаж остается в ране на нужной глубине для получения дренажного отделяемого. По дренажу Редона дренажное отделяемое попадает в резервуар цилиндра при механическом его сжатии за счет низкого давления, создаваемого в системе. Резервуар емкостью 400 мл. Игла из нержавеющей стали.



B-VAK MINI СИСТЕМА ДЛЯ ДРЕНАЖА РАН B-VAK MINI

Используется для дренажа в области операционного разреза пациента, Подкожно или чрезкожно , с применением вакуума. Состоит из катетера Редона, соединительной трубки, которая присоединяется с резервуаром дренажной системы, рассчитанной для введения в область операционного разреза, для дренажа отделяемого с применением низкого давления. Резервуар емкостью 25 мл. Дренаж по Редону , с иглой или без нее.



B-VAK DRAINAGE SYSTEM with double needle and drain СИСТЕМА ДЛЯ ДРЕНАЖА РАН B-VAK с двумя иглами

и дренажами.

Дренажная система B-VAK предназначена для дренажа в области операционного разреза пациента, подкожно или чрезкожно, с применением вакуума. Состоит из двух катетеров Редона, выполняющих дренажную функцию и вводимых на нужную глубину раны. Иглы после введения через слои кожи обрезаются. Дренажи устанавливаются на нужную глубину, в необходимых направлениях. Соединительная трубка присоединяется к резервуару дренажной системы. Дренажное отделяемое попадает в резервуар с помощью механического сжатия резервуара и создания тем самым низкого давления. Резервуар емкостью 400 мл. Иглы из нержавеющей стали.



**BTDS-2002 THORACIC DRAINAGE SYSEM
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
BTDS-2002 .**

Емкость 2000 мл
Наличие «водяного замка»
Два дренажных канала
Разгрузочный порт
Шкала для измерения количества дренажа с возможностью
делать пометки на ней
Длина трубки 150 см
Коннекторы трубок соответствуют коннекторам
торакальных катетеров различных размеров
Дополнительный порт Люэр-лок



BTDS-2001 THORACIC drainage system

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
BTDS-2001

Емкость 2000 мл

Шкала для измерения количества дренажа с возможностью
делать пометки на ней

Длина трубки 150 см

Коннекторы трубок соответствуют коннекторам торакальных катетеров
различных размеров

Дополнительный порт Люэр-лок



BPDS-700 pleural drainage

**ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ BPDS-700.**

Емкость 700 мл

Шкала для измерения количества дренажа с возможностью
делать пометки на ней

Длина трубки 150 см

Коннекторы трубок соответствуют коннекторам торакальных катетеров
различных размеров

Дополнительный порт Люэр-лок



BTDS-2001 THORACIC drainage system

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
BTDS-2001

Емкость 2000 мл

Разгрузочный порт

Шкала для измерения количества дренажа с возможностью
делать пометки на ней

Длина трубки 150 см

Коннекторы трубок соответствуют коннекторам торакальных катетеров
различных размеров

Дополнительный порт Люэр-лок



BPDS-2000 pleural drainage

**ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ BPDS-2000.**

Емкость 2000 мл

Шкала для измерения количества дренажа с возможностью
делать пометки на ней

Длина трубки 150 см

Коннекторы трубок соответствуют коннекторам торакальных катетеров
различных размеров

Дополнительный порт Люэр-лок



B1 urine coll-ba

Мочеприемник В1

Изготовлен из специального ПВХ, емкостью на 2000 или 1500 мл. Трубка устойчивая к перегибам, градуировка в мл. Длина трубки- 80,90,100,110,120,130 см. Имеются уплотненные кольца для подвешивания и конический коннектор с колпачком.



B2 urine coll-no

Мочеприемник В2

С клапаном против обратного тока, изготовлен из специального медицинского ПВХ, емкостью 2000 или 1500 мл. Трубка устойчивая к перегибам. Длина трубки 80, 90, 100, 110, 120, 130 см. Имеются кольца для подвешивания, конический коннектор с колпачком.



B3 urine coll-Bo

Мочеприемник В3

С клапаном против обратного тока и спускным отверстием на дне.
Изготовлен из специального медицинского ПВХ, емкостью 2000 мл. Трубка устойчивая к перегибам, длиной 80,90,100,110,120,130 см.. Имеются кольца для подвешивания, конический коннектор с колпачком.



B4 urine coll-cl.

Мочеприемник В4

Закрытая система, с держателем пакета или без него. С клапаном против обратного тока, спускным краном на дне, передвижным зажимом, отверстием для взятия проб. Емкостью 2000 мл, в индивидуальной стерильной упаковке. Длина трубки – 90,100,110,120,130 см. Имеются кольца для подвешивания. Материал- медицинский ПВХ.



Arthroscopy set.ipg

АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР.

Набор для проведения артроскопических манипуляций, ирригации суставов. Представляет из себя Y-образный соединительный шланг с передвижными зажимами, разные концы которого подсоединяются к системе растворов соответствующей концентрации и артроскопу соответственно. Имеет коннектор для взятия проб, резервуар для титруемых растворов. Длина-200 см. Материал- ПВХ, силикон.



DRAINAGE SYSTEM w/ soft drain **СИСТЕМА с ПАКЕТОМ ДЛЯ СБОРА ДРЕНАЖА**

- Пакет для секрета изготовлен из специального ПВХ
- Емкость пакета 2000 мл
- Клапан против обратного тока
- Спускное отверстие на дне
- Кольца для подвешивания
- Катетер с мягким округлым концом и четырьмя боковыми отверстиями.



DRAINAGE SYSTEM w/ soft drain **СИСТЕМА с ПАКЕТОМ ДЛЯ СБОРА ДРЕНАЖА**

- Пакет для секрета изготовлен из специального ПВХ
- Емкость пакета 2000 мл
- Клапан против обратного тока
- Спускное отверстие на дне
- Кольца для подвешивания
- Катетер с мягким округлым концом и четырьмя боковыми отверстиями.



ENEMA SET

НАБОР ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

- Емкость из ПВХ 1750 мл, градуировка в мл,
- Плотная лента для подвешивания мешка,
- Катетер с мягким округлым открытым концом и двумя боковыми отверстиями,
- Длина катетера 135 см.
- Передвижной зажим.
- Смягчающий гель, перчатки , мыльный раствор.
- Предназначается для ректального промывания, ирригации, дренирования. Для временного использования (менее 60 мин).



CONICAL CONNECTOR
КОНИЧЕСКИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ТРУБОК
Обеспечивает надежное соединение трубок.
Длина 40 мм
Люэр-лок

