


1 Распаковка и установка

Распаковка

1. Осторожно выньте прибор из картонной упаковки. Проверьте, не повреждена ли упаковка прибора и сам прибор; в случае обнаружения повреждений немедленно сообщите об этом транспортной компании.
2. Снимите упаковку с каждого компонента и проверьте наличие следующих предметов:

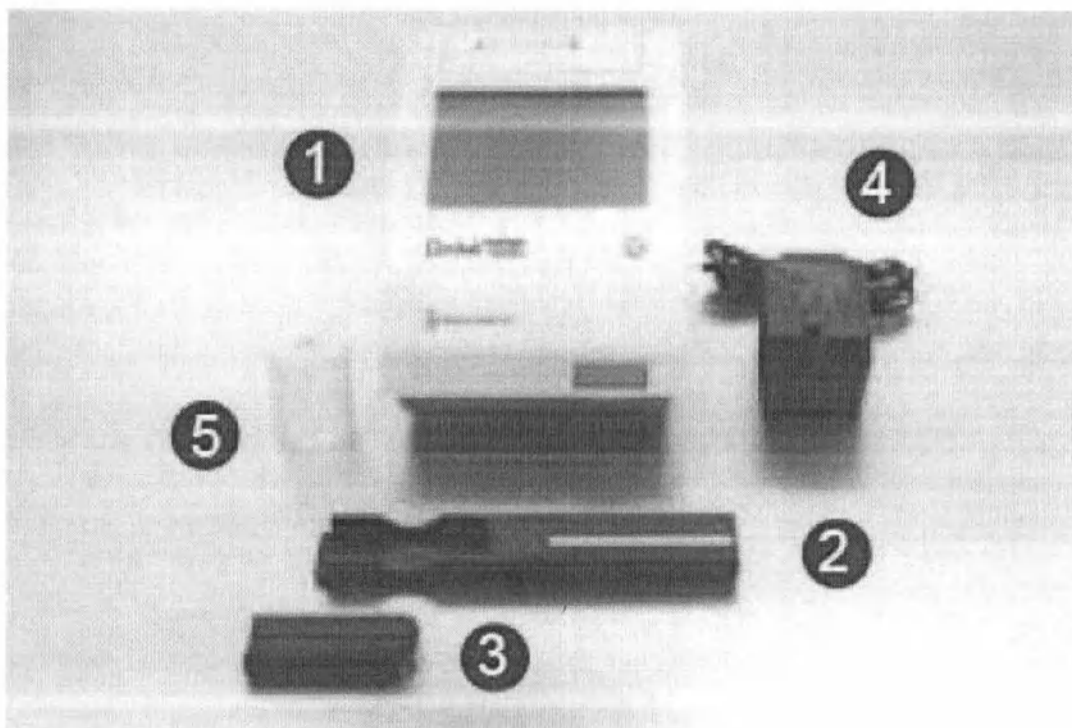

1 Анализатор Clinitek Status®+

2 Тестовая подставка

Не дотрагивайтесь до белой калибровочной шкалы.

3 Вкладыш тестовой подставки

Если вы используете тест-полоску с реагентом с 4 или менее контактными тестовыми поверхностями, например, Uristix 4, вы должны пользоваться коротким вкладышем тестовой подставки. Его следует заказывать отдельно (см. Приложение А, Региональные технические службы и дистрибьюторы).

4 Источник питания

Если вам не подходит данный тип кабельного шнура, свяжитесь с местным представительством компании Siemens (см. Приложение А, Региональные технические службы и дистрибьюторы).

5 Рулон бумажной ленты