

**ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИМКО БИОТЕК»**

105066, г. Москва, ул. Ольховская 45, стр.1, оф. 4, Российская Федерация тел. 495 737 8004, факс 495 737 3826, e-mail orders@simkoben.ru



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «СИМКО БИОТЕК»

Баулина С.А.

« » мая 2011г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ножницы медицинские для стоматологии

(см. Приложение)

производства фирмы: *USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH&Co. KG, Германия*

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наше новое стоматологическое оборудование **Ножницы медицинские для стоматологии**, производства компании ***USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH&Co. KG, Германия***. Эта инструкция разработана для медицинского персонала с целью обеспечения надежной работы и эксплуатации, а также его обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструкции по эксплуатации. Полностью прочитайте эту инструкцию, особенно указания по технике безопасности, прежде чем приступить к работе с данным медицинским изделием.

Для достижения максимального срока службы и производительности Ваших **Ножниц медицинских для стоматологии** тщательно следуйте, пожалуйста, нашим указаниям. **Ножницы медицинские для стоматологии**, производства компании ***USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH&Co. KG, Германия***, изготовлены из высококачественной стали, состав которой соответствует стандартам для профессиональных медицинских инструментов. А значит, они обладают прочностью, износостойкостью,

сопротивляемостью к коррозии. Чтобы инструмент сохранял свои свойства и служил Вам исправно, достаточно следовать простым рекомендациям:

- Перед использованием требуется обязательная стерилизация.
- Не оставляйте ножницы в воздушном стерилизаторе надолго, т.к. это негативно влияет на остроту ножниц. Следует учитывать, что чем ниже температура нагрева, тем меньше будет тупиться инструмент.
- Кладите ножницы на рабочий стол только в закрытом состоянии.
- При дезинфекции ножниц обращайте внимание на состав дезинфектанта ? некоторые из них могут повлечь затупливание и вызвать коррозию стали, из которой сделаны ножницы. Тем не менее, дезинфекцию нужно проводить регулярно. Обычно это делается при помощи погружения в раствор.
- Используйте ножницы только по назначению. Не применяйте ножницы для резки бумаги или других бытовых нужд!!!
- Храните ножницы закрытыми, с плотно сомкнутыми полотнами, в специальных чехлах или на подставках.
- Не пытайтесь самостоятельно затачивать ножницы, иначе необратимо повредите режущую кромку! Выявить необходимость заточки и осуществить ее Вам помогут в специализированных мастерских.
- Не роняйте ножницы! Любой удар может повредить их. Если ножницы все-таки упали, то не следует продолжать работать этим инструментом, так как вы только ухудшите состояние ножниц. Обратитесь в сервисный центр для осмотра инструмента.
- При обнаружении повреждений или неисправностей незамедлительно прекратить использование.
- Использовать ножницы должен только профессиональный медицинский персонал имеющий соответствующую подготовку.

Компания **USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH&Co. KG** стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH&Co. KG гарантирует первому владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки, а именно:

3 ГОДА ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДПИСАНО НИЧЕГО ДРУГОГО. Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом. Гарантия начинается с даты продажи первому покупателю.



Александр Александрович
Гусев