

(18) 84

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СИМКО БИОТЕК»

С.А.Баулина
«19» марта 2011 года



ИНСТРУКЦИЯ

По использованию ручного стоматологического инструмента

производства компании

USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Germany.

Ручной стоматологический инструмент компании USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Germany предназначен для использования в хирургической и терапевтической стоматологии, дентальной имплантологии и многих других направлениях современной стоматологии.

Инструменты компании USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG из высококачественной медицинской нержавеющей стали. Некоторые виды инструментов имеют твердосплавные вставки или напыление на рабочих частях, что повышает их технические характеристики.

Каждый инструмент проходит обязательный многоступенчатый контроль на всем пути от разработки и производства до отгрузки потребителю.

Долгую службу инструмента обеспечивает надлежащий уход, правильная стерилизация и четкое следование инструкции по использованию.

Ополаскивание и мойка

Немедленно после использования инструменты (в разобранном виде) моются и ополаскиваются теплой проточной водой, чтобы удалить все видимые загрязнения. Мойка может быть выполнена вручную с использованием щетки (не должна использоваться стальная щетка). Рекомендуется машинная мойка с применением ультразвуков. Перед стерилизацией рекомендуется также использование раствора USTOMED instrument preserving milk (cat. # 79-120-500), специально разработанного для защиты хирургического и стоматологического инструмента (концентрат для разведения водой в соотношении 1:30).

Подготовка к стерилизации

Перед стерилизацией инструменты, имеющие взаимно трущиеся поверхности

(ножницы, щипцы, кусачки и т. п.) должны быть смазаны. Рекомендуется масло **USTOMED oil Spray** (cat. # 79-130-040), произведенное фирмой **USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Germany**. Никакие индустриальные масла не должны использоваться. Инструменты для стерилизации должны быть упакованы поодиночке в соответствующую одноразовую упаковку или в наборы на специальных лотках из нержавеющей стали.

Более тяжелые инструменты должны располагаться в нижней части (на дне). Инструменты нужно всегда стерилизовать в нерабочем (незафиксированном) положении.

Стерилизация в заблокированном положении может вести к трещинам на инструментах.

Стерилизация

Рекомендуется стерилизация методом автоклавирования. Допускается стерилизация в сухожаровом шкафу, однако температура стерилизации не должна превышать 200 С (392) F. При стерилизации должны строго соблюдаться инструкции пользования стерилизационным аппаратом.

Любой хирургический инструмент, выполненный из нержавеющей стали, может подвергнуться действию коррозии, если не соблюдены правила предстерилизационной подготовки и правила стерилизации. **USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Germany** предоставляет следующие гарантийные сроки для медицинских инструментов: 5 лет для инструментов с жесткими вставками и 2 года для остальных инструментов при условии соблюдения всех требований по использованию и стерилизации. В течение гарантийного срока пришедший в негодность инструмент, имеющий заводской брак, подлежит замене.

Официальный эксклюзивный импортер в России и странах СНГ

ООО «СИМКО БИОТЕК»

Россия, 107066 Москва, ул.Ольховская 45, стр. 1, оф. 4,

тел. 495 737 8004, факс 495 737 3826, e-mail: orders@simkodent.ru

Всею промышленностью
и торговлею
И (два) миллиона

Пр
Ин
вег
дег
УС
Гм
Ulr