

ИНСТРУКЦИЯ По использованию

Инструментов стоматологических оттесняющих

производства компании
USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Германия.

Благодаря многолетним исследованиям и сотрудничеству с выдающимися специалистами в области дентальной и челюстно-лицевой хирургии, специалистам компании **USTOMED INSTRUMENTE** удалось создать уникальные инструменты, соответствующие многообразию современных передовых стоматологических и хирургических технологий.

Инструменты **USTOMED INSTRUMENTE** делаются из высококачественной медицинской нержавеющей стали особой композиции высококлассными специалистами, сочетающими в себе передающиеся из поколения в поколение мастерство и владение самыми современными технологиями производства ручного хирургического инструмента. Каждый инструмент проходит обязательный многоступенчатый контроль на всем пути от разработки и производства до отгрузки потребителю. Все это снискало заслуженную славу инструментам фирмы **USTOMED INSTRUMENTE** во многих странах на всех континентах.

Ручной стоматологический инструмент, к которому относятся и стоматологические оттесняющие инструменты, компании **USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG** (Германия), предназначен для использования в хирургической и терапевтической стоматологии, дентальной имплантологии и многих других направлениях современной стоматологии.

Данные инструменты изготавливаются из высококачественной медицинской нержавеющей стали, состав которой соответствует стандартам для профессиональных медицинских инструментов. А значит, они обладают прочностью, износостойкостью, сопротивляемостью к коррозии. Некоторые виды инструментов могут иметь твердосплавные вставки или напыление на рабочих частях, что повышает их технические характеристики.

Долгую службу инструмента обеспечивает надлежащий уход, правильная стерилизация и четкое следование инструкции по использованию.

Ополаскивание и мойка

Немедленно после использования инструменты (в разобранном виде) моются и ополаскиваются теплой проточной водой, чтобы удалить все видимые загрязнения. Мойка может быть выполнена вручную с использованием щетки (не должна использоваться стальная щетка). Рекомендуется машинная мойка с применением ультразвуков. Перед стерилизацией рекомендуется также использование раствора **USTOMED instrument preserving milk (cat. # 79-120-500)**, специально разработанного для защиты хирургического и стоматологического инструмента (концентрат для разведения водой в соотношении 1:30).

Подготовка к стерилизации

Перед стерилизацией инструменты, имеющие взаимно трущиеся поверхности должны быть смазаны. Рекомендуется масло **USTOMED oil Spray (cat. # 79-130-040)**, произведенное фирмой **USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Germany**. Никакие индустриальные масла не должны использоваться. Инструменты для стерилизации должны быть упакованы поодиночке в соответствующую одноразовую упаковку или в наборы на специальных лотках из нержавеющей стали. Более тяжелые инструменты должны располагаться в нижней части (на дне). Инструменты нужно всегда стерилизовать в нерабочем (незафиксированном) положении. Стерилизация в заблокированном положении может вести к трещинам на инструментах.

Стерилизация

Рекомендуется стерилизация методом автоклавирования. Допускается стерилизация в сухожаровом шкафу, однако температура стерилизации не должна превышать 200 С (392) F. При стерилизации должны строго соблюдаться инструкции пользования стерилизационным аппаратом. Любой хирургический инструмент, выполненный из нержавеющей стали, может подвергнуться действию коррозии, если не соблюдены правила предстерилизационной подготовки и правила стерилизации.

Использование

- Используйте стоматологические оттесняющие инструменты только по назначению.
- При обнаружении повреждений или неисправностей немедленно прекратить использование.
- Использовать инструменты должен только профессиональный медицинский персонал, имеющий соответствующую подготовку.

Гарантии

USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH & Co.KG, Германия предоставляет следующие гарантийные сроки для медицинских инструментов: 5 лет для инструментов с жесткими вставками и 2 года для остальных инструментов при условии соблюдения всех требований по использованию и стерилизации. В течение гарантийного срока пришедший в негодность инструмент, имеющий заводской брак, подлежит замене.

Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом. Гарантия начинается с даты продажи покупателю.

Официальный эксклюзивный импортер в России и странах СНГ

ООО «СИМКО БИОТЕК»

Россия, 107066 Москва, ул.Ольховская 45, стр. 1, оф. 4,

тел. 495 737 8004, факс 495 737 3826 , e-mail: orders@simkodent.ru



Васю прощено
и прокуроровано
Я мает.