


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МКНТ ИМПОРТ»

Юдин Л. П.

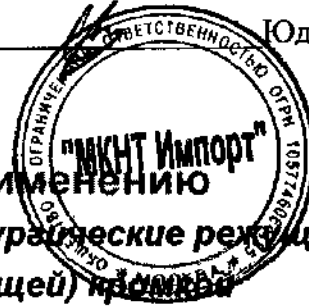

**Инструкция по применению
Инструменты медицинские хирургические режущие
и ударные с острой (режущей) рабочей частью**

ПОКАЗАНИЯ

Хирургические инструменты режущие и ударные MicroAire предназначены для использования при открытых операциях по имплантации эндопротезов и установки имплантатов для остеосинтеза пациентам обоих полов, практически без ограничения возраста.

Применимы в области хирургии костей, суставов и соединительной ткани.

Хирург самостоятельно определяет тип и размер необходимого инструментария, основываясь на собственном опыте и потребностях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный продукт не предназначен для использования в других областях хирургии, кроме ортопедии и травматологии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Инструменты поставляются стерильными. Не использовать инструменты с нарушенной стерильной упаковкой!
- Хирург несет ответственность за владение операционной техникой, требующей применения инструментов MicroAire.
- Предварительное ознакомление с настоящей инструкцией обязательно!

ВАЖНО!

- *Всегда проверяйте выравнивание браншей инструментов перед началом применения, во избежание возможного возникновения осложнений в работе ними по ходу операции!*
- *Перед началом использования следует уточнить структурный размер необходимого инструмента!*
- *Никогда не использовать инструмент не по назначению, рекомендованному в технической спецификации!*

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- выбрать необходимый для манипуляции комплект инструментов,
- проверить целостность стерильной упаковки каждого инструмента,
- надеть одноразовые перчатки,
- удалить упаковку,
- осуществить манипуляцию в соответствии с назначением инструмента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Режущие и ударные хирургические инструменты MicroAire следует хранить в сухом месте при температуре от + 10 до + 20°C (рекомендуемый диапазон).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделий составляет 4 года от даты выпуска.

Фирма-производитель:
MicroAire Surgical Instruments LLC

MicroAire[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

1641 Edlich Drive Charlottesville, VA 22911 U.S.A.
TEL (800) 722-0822 FAX (800) 648-4309
www.microaire.com