

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МКНД ИМПОРТ»
Юдин Л. Н.



Инструкция по применению

Инструменты медицинские хирургические зондирующие, бужирующие с принадлежностями

ПОКАЗАНИЯ

Хирургические инструменты зондирующие, бужирующие с принадлежностями предназначены для использования при открытых операциях по имплантации эндопротезов и установки имплантатов для остеосинтеза пациентам обоих полов, практически без ограничения возраста.

Применимы в области хирургии костей, суставов и соединительной ткани.

Хирург самостоятельно определяет тип и размер необходимого инструментария, основываясь на собственном опыте и потребностях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный продукт не предназначен для использования в других областях хирургии, кроме ортопедии, травматологии военно-полевой и челюстно-лицевой хирургии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не использовать стерильные инструменты с нарушенной стерильной упаковкой!
- Хирург несет ответственность за владение операционной техникой, требующей применения данных инструментов.
- Предварительное ознакомление с настоящей инструкцией обязательно!

ВАЖНО!

- ***Перед началом использования следует уточнить структурный размер необходимого инструмента!***
- ***Никогда не использовать инструмент не по назначению, рекомендованному в технической спецификации!***

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- выбрать необходимые для манипуляции инструменты и принадлежности,
- проверить целостность стерильной упаковки каждого инструмента,
- надеть одноразовые перчатки,
- удалить упаковку,
- осуществить манипуляцию в соответствии с назначением инструмента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хирургические инструменты зондирующие, бужирующие с принадлежностями следует хранить в сухом месте при температуре от + 10 до + 20°C (рекомендуемый диапазон).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделий составляет 5 лет от даты выпуска.

Фирма-производитель:

MicroAire Surgical Instruments LLC

MicroAire®
SURGICAL INSTRUMENTS

1641 Edlich Drive Charlottesville, VA 22911 U.S.A.
TEL (800) 722-0822 FAX (800) 648-4309
www.microaire.com