

Инструкция по применению

1. Назначение

Лак покрывной Синма–М+V предназначен для покрытия поверхностей металлических конструкций несъемных зубных протезов перед облицовкой их пластмассой Синма–М+V. Розовый концентрат может применяться для покрытия металлических частей протезов при изготовлении бюгельных протезов.

2. Свойства

Лак покрывной Синма–М+V представляет собой полимерную композицию типа порошок – жидкость. Порошки (грунты) лака покрывного Синма–М+V окрашены в четыре цвета (А, В, С, D). Цветовые оттенки лака подобраны с учетом основных оттенков расцветки Vita. При необходимости получения цвета с более интенсивным оттенком, к основному порошку добавляют небольшое количество концентрата красителя нужного цвета и тщательно перемешивают. Концентраты красителей – белого, желтого, коричневого, серого и розового цветов.

Внимание:

Кисточку сразу после нанесения лака следует промыть в мономере АКР – 7.

3. Способ применения

Для приготовления лака необходимо смешать порошок и жидкость лака покрывного Синма–М+V в соотношении 1:1. Лак следует отверждать в термошкафу при температуре 170 °С в течение 3 мин или в токе горячего воздуха над горелкой.

Внимание:

Не следует отверждать лак в пламени горелки, так как это приводит к нарушению целостности лаковой пленки.

4. Комплектность

Лак покрывной Синма-М+V содержит:

- порошок (грунт) четырех цветов (А, В, С, D) – 4 банки по 8 г;
- жидкость – 55 г;
- концентраты красителей пяти цветов (белый, желтый, коричневый, серый, розовый) – 5 банок по 4 г;
- пробка – капельница – 1 шт;
- инструкция по применению.

Допускается поставка розового концентрата красителя в отдельной упаковке:

- концентрат красителя – 1 банка - 15 г;
- жидкость – 1 флакон – 15 г;
- пробка – капельница ;
- инструкция по применению.

5. Условия хранения

Лак покрывной Синма-М+V должен храниться при температуре от 5 °С до 25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и отсутствии открытых источников огня.

Гарантийный срок хранения 1,5 года.

Председатель Правления
АО «Стома»

