

ВОСК ЛИТЬЕВОЙ **ВОСКОЛИТ**

Акционерное общество «Стома»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Восколит применяется для создания литниково-питающей системы при отливке металлических деталей зубных протезов.

Восколит выпускается двух наименований:

Восколит-1 (зеленого цвета) – применяется при отливке каркасов бюгельных протезов непосредственно на огнеупорной модели;

Восколит-02 (синего или розового цвета) – применяется при отливке металлических элементов вне модели.

2. Свойства

Штифты Восколита-1 в интервале температур 20-30 °С гибкие и могут быть подведены к участку модели под любым углом без подогрева.

Восколит-2 – твердый.

Восколит легко соединяется с восковыми моделями, образуя прочный спай, не вступает в реакцию с соединениями и огнеупорными массами, выплавляется и сгорает без остатка.

3. Способ применения

Построение литниково-питающей системы производят общепринятыми в литейной практике методами. Штифты соединяют с восковыми моделями слабо разогретым шпателем, расплавляя воск штифта. Для депо металла так называемые «муфты» наносятся на литники путем постепенного наслоения каплями расплавленного на шпателе воска. Из огнеупорной формы выплавка воска производится в муфельных печах при постепенном повышении температуры в течение часа от 60 до 200 °С.

Примечание. Не следует выплавлять Восколит на открытом пламени.

4. Комплектность

Комплект Восколита содержит: набор из 76 восковых цилиндрических палочек четырех размеров общей массой 150 г: размер № 1 – 10 штук, № 2 – 30 штук, № 3 – 10 штук, № 4 – 26 штук; инструкцию по применению.


5. Условия хранения

Восколит сохраняют в закрытых помещениях, исключаящих попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от + 5 °С до + 25 °С.

Гарантийный срок хранения 3 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

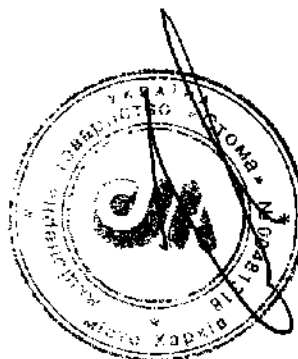

С.В.Черняев