

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Назначение

Пластмасса Протакрил-М предназначена для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых, ортодонтических аппаратов и съемных шин-протезов при заболеваниях пародонта.

2. Основные свойства

Протакрил-М представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. Введение в состав пластмассы сшивающего агента способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделия. Пластмасса Протакрил-М технологична в работе, изделия из нее хорошо обрабатываются и по цвету имитируют ткани полости рта.

3. Способ применения

Изготовление зубных протезов

1. Изготовление гипсовой формы производится по общепринятой методике.
2. Гипсовую форму изолируют разделительным лаком Изокол-69.
3. Изготовление формовочной массы.

Порошок и жидкость тщательно смешивают в соотношении 2:1 в фарфоровом или стеклянном сосуде. Сосуд с массой накрывают крышкой и оставляют для набухания. Во время набухания массу 1-2 раза перемешивают металлическим шпателем. Массу считают готовой к формированию, когда она теряет липкость и не пристает к рукам.

4. Полимеризация

Полимеризацию пластмассы Протакрил-М можно осуществлять двумя способами.

Первый способ

Кювету с гипсом перед паковкой формовочной массы нагревают в сушильном шкафу до температуры 34-40 °С, а затем заполняют массой с избытком и накрывают контрформой для прессования. Прессование производят медленно, чтобы масса заполняла всю полость гипсовой формы. Кювету после закрытия выдерживают под прессом в течение 30-40 минут до полной полимеризации.

Второй способ

Полимеризацию производят в полимеризаторе под давлением воздуха 3 атм. и температуре 40-45 °С в течение 25-30 минут.

5. Обработка протеза

Обработку и полировку производят по общепринятой методике.

Хранение и использование обычное.

Изготовление ортодонтических, ортопедических аппаратов и починка протеза производится по методикам, описанным выше.

6. Комплектность

Комплект пластмассы Протакрил-М содержит:

- порошок Протакрил-М – 160,0 г;

- жидкость Протакрил-М – 100,0 г;
- лак разделительный Изокол-69 – 50,0 г;
- инструкцию по применению.

7. Условия хранения

Протакрил-М хранят при температуре от 5°C до 25°C и отсутствии открытых источников огня.

Гарантийный срок хранения 1,5 года.

Генеральный директор
ООО «Стома – Эр»



Абовян А.И.