

ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ **ЛАВАКС**

Акционерное общество «Стома»
Украина, г.Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск Лавакс применяется для создания восковых моделей при несъемном протезировании – изготовлении вкладок, пластмассовых коронок, комбинированных коронок, фасеток металл-пластмасса, штифтовых зубов, полукоронок, трехчетвертных коронок.

2. Свойства

Воск моделировочный Лавакс представляет собой композицию на основе парафина, натуральных и синтетических восков.

Воск Лавакс легко размягчается без расслоения, при легком скоблении дает сухую невязкую стружку. В интервале температур 43-48 °С воск пластичен и хорошо формуется, зольность воска не превышает 0,1 %.

3. Способ применения

Палочку воска Лавакс размягчают над пламенем спиртовой или газовой горелки, вращая и быстро пронося ее на расстоянии 2-3 см от верхней части пламени, не допуская оплавления и растекания поверхности палочки.

Размягченный воск слегка обжимают пальцами и приступают к моделированию. Обработку воска проводят по общепринятым в стоматологической практике методам.

Воск моделируют шпателем, скальпелем и другими зуботехническими инструментами. При обработке воска образуется сухая, невязкая стружка.

4. Комплектность

Комплект воска Лавакс выпускается в виде окрашенных или неокрашенных палочек, упакованных в картонную коробку в количестве 10 штук. Масса комплекта 20 г.


5. Условия хранения

Хранение воска должно производиться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Гарантийный срок хранения 3 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

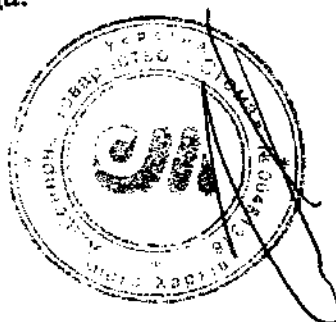

С.В.Черняев