

**МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК**

АКРОДЕНТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Акродент – по применению аналог Акрилоксида.

Материал стоматологический для временных пластмассовых коронок

Акродент применяется:

- для изготовления временных пластмассовых коронок;
- для перебазировки любых пластмассовых коронок;
- для восстановления жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съемных пластиночных протезах и аппаратах при их стирании и восстановления высоты прикуса.

2. Свойства

Акродент обладает хорошей пластичностью, временные коронки из него легко обрабатываются и полируются, приобретая блеск и естественный вид зубов. Материал не имеет «песочной» стадии, что позволяет применять его сразу после смешивания порошка и жидкости. Акродент имеет хорошее соединение при перебазировке коронок или реставрации любых других поверхностей зуба.

3. Способ применения

При изготовлении временных пластмассовых коронок предварительно получают анатомический оттиск силиконовым материалом (Сизласт К или аналогичным) до начала препарирования зубов. После окончания препарирования зубов получают новый силиконовый оттиск, по которому отливают гипсовую модель. Все вышеперечисленные виды работ осуществляются на гипсовой модели и под контролем прикуса.

В тигель наливают жидкость Акродент в количестве, необходимом для коронки, и постепенно добавляют порошок, замешивая шпателем до полного насыщения жидкости (поверхность массы при этом должна быть влажной, но без избытка жидкости). Замешивание производят в течение 40-50 секунд, после чего приготовленным материалом заполняют отпечатки зубов на первом оттиске и накладывают на гипсовую модель. Масса сохраняет пластичность в течение 1,5-2 минут. Через 6-10 минут снимают с модели первый оттиск и извлекают коронки. Механическую обработку коронки производят абразивными инструментами после ее полного отверждения. Полировку производят без больших нагрузок.

Примечание: Для уменьшения в полимеризате остаточного мономера необходимо выдержать временные коронки в проточной горячей водопроводной воде (45-50 °С) в течение 6 часов. Качество работы зависит от навыка применения данного материала и соблюдения инструкции, поэтому желательно первые опыты проводить на фантомных зубах.

4. Комплектность

Комплект материала Акродент содержит:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - порошок трех цветов (№ 10, 12, 16) | - 3 флакона по 20 г; |
| - жидкость | - 2 флакона по 25 г или
1 флакон 50 г; |
| - мерник для порошка | - 1 шт.; |
| - пробку-капельницу | - 2 шт.; |
| - инструкцию по применению | - 1 шт. |

5. Условия хранения

Материал Акродент должен храниться защищенным от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии более 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 1 год.

Председатель Правления
АО «Стома»



С.В.Черняев

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2 листов

Директор

 Б.П. Наумов

