

ВОСК БЮГЕЛЬНЫЙ-02

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Назначение

Воск бюгельный -02 применяется в ортопедической стоматологии для создания промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов.

2. Свойства

Воск бюгельный-02 обладает высокой пластичностью легко формуется на модели.

3. Способ применения

Для получения промежуточного пространства при моделировании каркаса бюгельного протеза, восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой воде, укладывают на модель и формируют, прижимая воск к модели пальцами рук, избегая при этом лишних усилий, чтобы не истончать местами восковую пластинку. Толщину восковой пластинки определяет врач.

4. Комплектность

Комплект Воска бюгельного-02 содержит:

- набор пластин двух размеров общей массой (100 ± 10) г:
размер № 1 $-(40 \pm 5)$ г;
размер № 2 $-(60 \pm 5)$ г;
- инструкцию по применению – 1 шт.


5. Условия хранения

Хранение должно производиться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

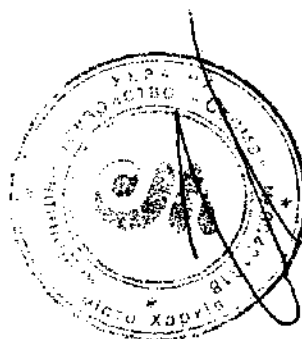

С.В.Черняев