

ВОСК

**Моделировочный для
мостовидных протезов**

Акционерное общество «Стома»
Украина, г.Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

Воск моделировочный для мостовидных протезов представляет собой композицию на основе парафина, восков и натуральной смолы.

1. Назначение

Воск предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза.

2. Свойства

Воск дает малую тепловую усадку и не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении.

При выгорании зольность его не превышает 0,1 %.

Воск легко поддается моделировке штихелями, скальпелями и другими зуботехническими инструментами, дает сухую невязкую стружку.

3. Способ применения

Воск слегка размягчают над пламенем горелки, не допуская оплавления и растекания. Воск можно размягчать также под лампой накаливания или поместив в водяную баню с температурой воды 45-50 °С на 3-5 минут.

Размягченный восковой валик устанавливают на гипсовой модели в месте дефекта зубного ряда и припасовывают его к зубам, ограничивающим место дефекта.

На размягченном валике получают отпечатки режущих краев или жевательной поверхности зубов-антагонистов и приступают к моделированию зубов.

При изготовлении фасеток и других деталей моделировку производят по общепринятым в стоматологической практике методам.

4. Комплектность

Комплект воска моделировочного для мостовидных протезов содержит 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40 x 9 x 9 мм, общей массой 55 г и инструкцию по применению.


5. Условия хранения

Воск хранят в закрытом, сухом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей. Хранить воск допускается при температуре от + 5 °С до + 25 °С, отсутствии открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

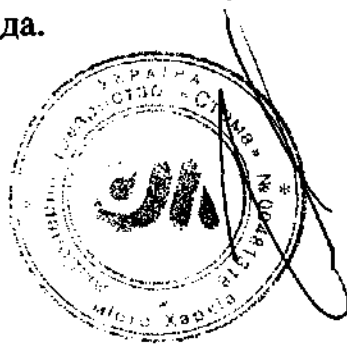

С.В.Черняев