

КОМПЛЕКТ ВОСКОВ МОДЕЛИРОВОЧНЫХ МОДЕВАКС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТОМА»

Украина, г.Харьков, ул. Ньютона, 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Назначение

Модевакс применяется в ортопедической стоматологии для моделирования несъемных цельнолитых протезов и для других зуботехнических целей. Модевакс представляет собой комплект из восков трех цветов различного качества.

Красный воск предназначен для моделирования пришеечной части протеза и коронок.

Синий – для моделирования промежуточной части протеза.

Зеленый – для моделирования коронок.

2. Основные свойства

Воск красный – низкой твердости, температура застывания $(55\pm 3)^\circ\text{C}$; воск синий – средней твердости, температура застывания $(56\pm 3)^\circ\text{C}$; воск зеленый – твердый, температура застывания $(57\pm 3)^\circ\text{C}$.

3. Способ применения

Разогретым зуботехническим шпателем набирают необходимое количество воска, расплавляют над пламенем горелки и по каплям наносят на модель.

Моделировку восковых деталей протеза проводят по общепринятым в стоматологической практике методам.

Воск хорошо обрабатывается зуботехническим инструментом. Отдельные смонтированные детали соединяются расплавленным воском.

4. Комплектность

Комплект восков моделировочных Модевакс содержит:

Восковые палочки общей массой (60 ± 3) г;

- красного воска – 2 шт.;

- синего воска – 6 шт.;

- зеленого воска – 6 шт.;

Инструкцию по применению – 1 шт.


5. Условия хранения

Хранение должно производиться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при температуре от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

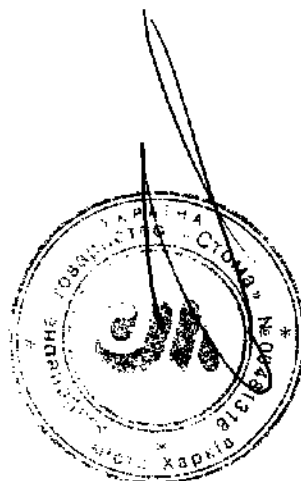

С.В.Черняев