

(8)

ВОСК ПРОФИЛЬНЫЙ ДЛЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ „ВОСКОЛИТ-03”

Акционерное общество «Стома»
Украина, г.Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск профильный для бюгельного протезирования Восколит-03 представляет собой набор различных по конфигурации в сечении палочек воска, изготовленных из окрашенного сплава парафина, церезина и натуральных восков и предназначен для моделирования каркасов бюгельных протезов.

2. Свойства

Восковые профили обладают гибкостью и под действием температуры пальцев рук легко поддаются моделированию.

Собранный каркас снимается с модели без деформации.

Зольность воска не более 0,1 %.

3. Способ применения

На гипсовой модели карандашом размечают границы готовящегося бюгельного протеза с пластмассовым основанием, соединенным бюгельной дугой верхнего или нижнего протеза и кламмерными креплениями.

Размеры восковых профилей для дуг и кламмеров бюгельных протезов определяются врачом-протезистом при выборе конструкции протеза.

Все детали разметки переносят на модель в истинном сечении с тем, чтобы затем изолировать тонким слоем бюгельного воска места, где будет базис из пластмасс. Предварительно моделируют опорные или многосвязные кламмеры, выкраивают на каждый зуб восковые сегменты, к дуге приклеивают петли, на нижнем бюгеле – седло, на верхнем бюгеле для удержания пластмассы приклеивают сетку.

Все детали из восковых профилей соединяет горячим шпателем.

Размеры профилей: профили № 1 диаметром 1,0 мм и № 2 – 1,5 мм; профили № 3-8 – сегменты с основанием a и высотой h . Для моделирования кламмеров предназначены: № 3 $a = 1,5$ мм, $h = 1,0$ мм; № 4 $a = 2,5$ мм, $h = 1,0$ мм и № 5 $a = 3,0$ мм, $h = 1,8$ мм; для нижней бюгельной дуги - № 6 $a = 4,0$ мм, $h = 1,5$ мм и № 7 $a = 5,0$ мм, $h = 1,5$ мм; для верхней бюгельной дуги - № 8 $a = 6,0$ мм, $h = 1,5$ мм.

4. Комплектность

Комплект Восколита-03 содержит 8 размеров восковых профилей общей массой 65 г и инструкцию по применению.


5. Условия хранения

Хранение воска должно производиться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от + 5 °С до + 25 °С.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

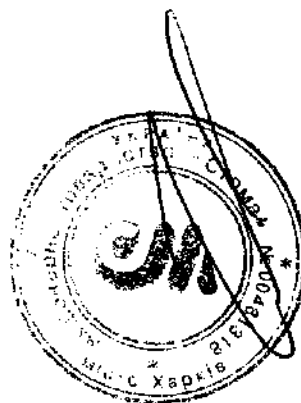

С.В.Черняев