

ВОСК

**липкий для
зуботехнических работ**

Акционерное общество «Стома»
Украина, г.Харьков, ул.Ньютона, 3

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск липкий применяется в стоматологической практике для склеивания звеньев металлических протезов при подготовке их к паянию.

2. Свойства

Воск обладает хорошей адгезией к металлу и необходимой прочностью, имеет удобную для применения форму (палочки). Температура каплепадения воска не менее 65 °С, зольность не более 0,1 %.

3. Способ применения

Разогретым зуботехническим шпателем от палочки липкого воска отрезается необходимое количество материала и нагревается на шпателе над пламенем горелки до полного расплавления. Расплавленная масса быстро заливается со шпателем в места соединения звеньев металлической конструкции протеза.

После затвердевания воска склеенные металлические звенья протеза формуются в огнеупорную массу.

Последующие этапы изготовления протезов являются общепринятыми.

4. Комплектность

Воск липкий для зуботехнических работ выпускается в виде цилиндрических палочек. Комплект содержит 10 палочек общей массой 50±5 г и инструкцию по применению.


5. Условия хранения

Воск липкий для зуботехнических работ хранят в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, при температуре от + 5 °С до + 25 °С.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Председатель Правления

АО «Стома»

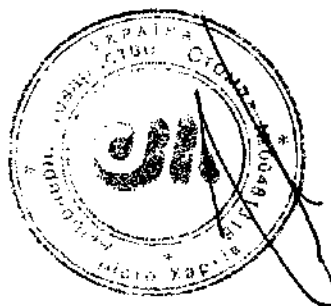

С.В.Черняев