

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Назначение

Пластмасса Этакрил-02 применяется в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съемных зубных протезов.

2. Свойства

Этакрил-02 представляет собой акриловую пластмассу горячего отверждения типа порошок-жидкость.

Этакрил-02 характеризуется высокими технологическими свойствами, повышенной прочностью.

Протезы изготовленные из пластмассы Этакрил-02, хорошо имитируют слизистую оболочку полости рта.

3. Способ применения

3.1 Изготовление гипсовой формы в кювете

Гипсование производят по общепринятой методике. После удаления воска гипсовую форму обрабатывают разделительным лаком Изокол-69. Изокол-69 наносят мягкой кисточкой, не задевая пластмассовые зубы.

3.2 Приготовление формовочной массы и паковка

Порошок и жидкость смешивают в массовом соотношении 2:1:0,9 соответственно в фарфоровой или стеклянной посуде; посуду с массой закрывают и оставляют для набухания на 15-30 мин. в зависимости от температуры окружающей среды.

В процессе набухания массу несколько раз перемешивают шпателем. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет липкость и не пристает к рукам и стенкам сосуда.

Производят паковку массы в кювету.

После полного закрытия кюветы ее выдерживают под холодным прессом в течение 10-15 мин., а затем зажимают в бюгель и подвергают термической обработке (полимеризации).

3.3 Полимеризация

Полимеризацию материала производят на водяной бане или в термошкафу при соблюдении следующего режима:

- повышают температуру в бане или в термошкафу до 45-50 °C в течение 15-20 мин.; затем постепенно в течение 35-40 мин доводят температуру, при полимеризации на водяной бане, до кипения воды или при полимеризации в термошкафу до 110-115 °C;

- выдерживают при этих температурах около 30 мин;

- охлаждение кюветы производят на воздухе до комнатной температуры.

Важно! Извлекать из кюветы только полностью охлажденный протез.

3.4 Обработка протеза

Обработку и полировку протеза производят по общепринятой методике.

4. Комплектность

Комплект Этакрил-02 содержит:

- порошок – 300 г
- жидкость – 150 г
- инструкцию по применению.

5. Условия хранения

Этакрил-02 должен храниться защищенным от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в огнебезопасных помещениях при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить вдали от открытых источников огня, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Генеральный директор
ООО «Стома – Эр»



Абовян А.И.