

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Назначение

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов.

2. Свойства

Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру.

Обладают хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильность.

Зубы Эстедент-02 соответствуют расцветке Vita и выпускаются по 9 цветовым оттенкам А2; А3; А3,5; В2; В3; С2; С3; Д2; Д3.

Зубы Эстедент-02 соответствуют расцветке «Эстедент-03» и выпускаются по 9 цветовым оттенкам под номерами № 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 40, 41.

Зубы имеют 13 фасонов передних верхних зубов, 5 фасонов передних нижних зубов, 5 фасонов жевательных зубов.

3. Способ применения

3.1 Зубы Эстедент-02 устанавливаются на восковые базисы съемных конструкций зубных протезов с последующей заменой воска на базисную пластмассу.

3.2 Подбор цвета зубов производится при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета естественных зубов.

3.3 Подбор фасона зубов осуществляется в соответствии со стандартной картой фасонов и форм зубов искусственных пластмассовых Эстедент-02 с учетом их сочетаний, прилагаемой в упаковке.

4. Комплектность

Зубы пластмассовые Эстедент-02 выпускаются в картонных коробках и пластмассовых секционных контейнерах.

Комплектация в картонных коробках (гарнитуры на планках):

- 4 полных гарнитура зубов – 4 х 6 передних верхних
4 х 6 передних нижних
4 х 16 жевательных (боковых)
- 5 полных гарнитура зубов – 5 х 28.

Виды комплектации в пластмассовых секционных контейнерах:

- 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов – 20 гарнитуров;
- 1 контейнер передних верхних гарнитуров на 6 зубов – 20 гарнитуров;
- 1 контейнер передних нижних гарнитуров на 6 зубов – 20 гарнитуров;
- 4 контейнера жевательных (боковых) гарнитуров на 16 зубов – 40 гарнитуров.

5. Условия хранения

Зубы Эстедент-02 должны храниться у потребителя при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте.

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Генеральный директор
ООО «Стома – Эр»



Абовян А.И.