

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ «АБАКТОЛАТ-К»

Хирургический шовный материал с пролангированным антибактериальным действием «АБАКТОЛАТ-К» выпускается партиями, состоящими из традиционных косичек, помещенных в стерильные стеклянные «евробанки» емкостью от 200 до 750 мл (ГОСТ 5717-01; ГОСТ 10117-01; ГОСТ 15844-92) в зависимости от комплектации с широким горлом и герметической винтовой металлической крышкой (ГОСТ 25749-83; ГОСТ Р 51214-98; СанПин 42-123-4240-86), поверх которой имеется наклеенная контрольная полоска с указанием стерильности и штампа ОТК.

Шовный материал залит стабилизирующим антибактериальным раствором на основе 96% спирта. Вид, номер шовного материала, комплектность и метраж, срок годности указаны на этикетке. Банка с шовным материалом хранится в защищенном от света месте при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Шовный материал «АБАКТОЛАТ-К» извлекается из банки непосредственно перед операцией. Вспомогательный медицинский персонал в операционной открывает крышку путем поворота ее на резьбе против часовой стрелки на 10° - 15° . Операционная сестра перед началом операции стерильным инструментом извлекает из раствора необходимое количество шовного материала, удерживая его некоторое время над банкой, дает стечь избытку стабилизирующего раствора, после чего раскладывает шовный материал на стерильном операционном инструментальном столе на сухие стерильные марлевые салфетки, и спустя 5-7 минут шовный материал может использоваться по назначению.

Банка закрывается крышкой по часовой стрелке на тот же угол и помещается на место постоянного хранения. Наличие в банке стабилизирующего раствора создает возможность возврата неиспользованного в ходе операции шовного материала «АБАКТОЛАТ-К» в банку с полным сохранением его исходных свойств, в том числе и аутостерильности.

Генеральный директор

Плечев В.В.



07 2000 г.