

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



И.Л. Горячев

2007г.

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ТРИММЕРНЫЕ
ВОЗДУШНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЗАУШНОГО ТИПА
«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р»,
«БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р», «БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

Паспорт

211-00-00 ПС

2007

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име № дубл	Подпись и дата

Содержание

	Лист
1 Технические требования	5
2 Комплектность	8
3 Техническое описание	9
4 Подготовка к работе	13
5 Использование СА	15
6 Техническое обслуживание	17
7 Простейшие неисправности и методы их устранения	19
8 Свидетельство о приемке	20
9 Гарантии изготовителя	21
Приложение А. Гарантийный талон	22
Лист регистрации изменений	25

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Полятов			05.06.08
Провер.	Скворцов			05.06.08
Н. Контр.				

211-00-00 ПС

Аппараты слуховые электронные
цифровые триммерные воздушного
звукотрансдукции заушного типа
«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р»,
«БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р»,
«БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

Лит.	Лист	Листов
	2	25
ООО «КБ Аудиомаг»		

Паспорт

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования аппаратами слуховыми электронными, цифровыми триммерными воздушного звукопроведения заушного типа «БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р», «БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р» (в дальнейшем СА) и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной эксплуатации и технического обслуживания СА.

СА предназначены для звукоусиления по воздушному звукопроведению при слабых и средних («БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т42М»), средних и тяжелых («БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41Р», «БРИЗ-Т42Р») потерях слуха.

В СА осуществляется цифровая обработка звуковых сигналов.

СА имеют две программы прослушивания и настраиваются с помощью триммеров.

Триммерная настройка позволяет легко и точно настроить СА без применения компьютера.

СА предназначены для индивидуального пользования.

Цифровая обработка звукового сигнала, широкий динамический диапазон и разнообразные регулировки параметров СА обеспечивают естественное звучание, оптимальную разборчивость речи.

СА отличаются современным дизайном, хорошими электроакустическими характеристиками, удобны в эксплуатации, надежны.

При эксплуатации СА располагается за ухом пациента и соединяется со слуховым проходом при помощи гибкого звукопровода с ушным вкладышем.

СА по устойчивости к механическим воздействиям относятся к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от степени потенциального риска применения СА относятся к классу 2а ГОСТ Р 51609-2000.

СА применяются по назначению врача.

Имеет подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. №
Подпись и дата	

И	Зам	01-08	А.А.	23.01.08
000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	исх	Дата

211-00-00 ПС

Лист
3

Подбор и настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

Примечание – Если СА приобретен в организации, которая не оказывает услуги по подбору и настройке СА, то обращайтесь в сурдологический центр или кабинет слухопротезирования по месту жительства.

СА сертифицирован.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.В06515

Срок действия – по 11.09.2010г.

Выдан ООО ЦСМИ ВНИИМП

Име. Наимол.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл	Подпись и дата

Име.	Лист	Аб. Адрес	Подпись	Дата
000 ЦСМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU		

211-00-00 ПС

Лист
4

I Технические требования

1.1 Параметры СА должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Примечания:

1. Параметры по п.п. 1 - 13; 15, 16 таблицы 1 приведены при включении переключателя в положение "М".
2. Параметры по п. 14 таблицы 1 приведены при включении переключателя в положение "Т"

1.2 Номинальное напряжение питания слухового аппарата 1,4 В.

Питание осуществляется от элемента питания 675 или аналогичного.

1.3 Средний срок службы СА 5 лет.

№. Подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Исх	Дата	211-00-00 ПС	Лист 5
-----------	---------------	-----------------------	-----	------	--------------	-----------

Инв.Неподл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв № дубл	Подпись и дата

Изм.	2
Лист	5
№ докум.	18-07
Подпись	И.И.И.
Дата	10.04.17
211-00-00 ПС	
Лист	6

Таблица 1

Наименование параметра	Тип аппарата					
	"БРИЗ-Т31М"	"БРИЗ-Т31Р"	"БРИЗ-Т41М"	"БРИЗ-Т41Р"	"БРИЗ-Т42М"	"БРИЗ-Т42Р"
1	2	3	4	5	6	7
1 Полное акустическое усиление, дБ:						
максимальное	55±4,5	65±4,5	55±4,5	65±4,5	55±4,5	65±4,5
на частоте 1600 Гц	45±4,5	55±4,5	45±4,5	55±4,5	45±4,5	55±4,5
2 Максимальный ВУЗД ₉₀ , дБ	125±4	131±4	125±4	131±4	125±4	131±4
3 Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
4 Глубина неоперативной регулировки акустического усиления, дБ, не менее	—	—	—	—	30	30
5 Глубина регулировки ВУЗД, дБ, не менее	—	—	20	20	-	-
6 Коэффициент компрессии, не менее	3	3	3	3	3	3
7 Верхняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500
8 Нижняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀

Ина.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Ина № дубл	Подпись и дата

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
9 Глубина регулировки тембра в области низких частот, дБ, не менее	35	35	35	35	35	35
10 Глубина регулировки тембра в области высоких частот, дБ, не менее	20	20	20	20	20	20
11 Коэффициент гармоник на частотах, %, не более: 500 Гц	5	5	5	5	5	5
1000 Гц	3	3	3	3	3	3
1600 Гц	3	3	3	3	3	3
12 Приведённый ко входу уровень собственных шумов (при кривой А), дБ, не более	29	29	29	29	29	29
13 Потребляемый ток, мА, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14 Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	100	110	100	110	100	110
15 Время срабатывания АРУ, мс, не более	20	20	20	20	20	20
16 Время восстановления АРУ, мс, не более	120	120	120	120	120	120

Изм.	3
Лист	2 из 2
№ докум.	19-02
Подпись	<i>[Подпись]</i>
Дата	15.10.19
211-00-00 ПС	
Лист	7

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество
1	2	3
1 Аппарат слуховой электрон- ный цифровой триммерный воздушного звукопроведения заушного типа "БРИЗ-Т31М"	211-00-00	1
"БРИЗ-Т31Р"	211-00-00-01	
"БРИЗ-Т41М"	211-00-00-02	
"БРИЗ-Т41Р"	211-00-00-03	
"БРИЗ-Т42М"	211-00-00-04	
"БРИЗ-Т42Р"	211-00-00-05	
Принадлежности		
2* Звукопровод № 1	180-06-00	1
3* Звукопровод № 2	180-06-00-01	1
4* Звукопровод № 3	180-06-00-02	1
6* Элемент питания 1,4В	Тип 675	2
7 Футляр	205-07-00	1
8 Коробка	126-00-14	1
Эксплуатационная документация		
12 Паспорт на СА	211-00-00 ПС	1

Примечание - По согласованию с потребителем, слуховой аппарат может комплектоваться позициями принадлежностей, отмеченными * в любом наборе

Подпись и дата	Име № дубл	Взам. инв. №	Подпись и дата	не. №подл.

3 Техническое описание

3.1 В СА окружающие звуки воспринимаются миниатюрным микрофоном, преобразуются им в электрические сигналы, которые затем усиливаются и подводятся к электромагнитному телефону, где вновь преобразуются в акустические сигналы, поступающие по системе звукопроводов в наружный слуховой проход пользователя.

3.2 Внешний вид СА" показан на рисунке 1

В СА предусмотрены два режима работы – от микрофона "М" и индукционной катушки "Т". Режим работы с индукционной катушкой применяется при пользовании телефонным аппаратом, либо при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлёй связи. В остальных случаях используется режим работы от микрофона.

В СА "БРИЗ-Т31М", "БРИЗ-Т31Р" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L" и автоматический регулятор усиления "AGC".

В СА "БРИЗ-Т41М", "БРИЗ-Т41Р" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L", автоматический регулятор усиления "AGC", регулятор выходного уровня звукового давления "РС".

В СА "БРИЗ-Т42^МР", "БРИЗ-Т42Р" имеются плавные неоперативные регуляторы: регулятор тембра в области низких частот "N-H", регулятор тембра в области высоких частот "N-L", автоматический регулятор усиления "AGC" и неоперативный регулятор акустического усиления "G".

При подборе аппарата, в зависимости от индивидуальных потерь слуха, врач выставляет нужное положение неоперативных регуляторов. Самостоятельно этими регуляторами пользоваться не рекомендуется.

Име. Наполн.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл	Подпись и дата

Внимание!

Обращайтесь с регулятором усиления СА бережно, без усилий, плавными движениями регулируя громкость.


На поверхности корпуса СА имеются следующие переключатели:

- переключатель режима работы О-Т-М предназначен для включения – выключения слухового аппарата и выбора программы прослушивания с подключением телефонной катушки или микрофона;
 - ♦ в положении О переключателя СА выключен;
 - ♦ в положении М переключателя работает основная программа прослушивания с помощью микрофона. СА усиливает акустические сигналы (речь, музыка и другие звуки) принимаемые микрофоном;
 - ♦ в положении Т переключателя работает программа прослушивания с помощью телефонной катушки. СА усиливает электромагнитные сигналы, принимаемые телефонной катушкой.
- выдвижной держатель элемента питания предназначен для установки элемента питания в СА;
- триммеры – регуляторы для настройки СА

Примечание: Положение триммеров настраивается специалистом при слухопротезировании и отмечается на рисунке ² ^Б СА

КУПИТЬ
ПОДПИСЬ


Подпись и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Исполн.	

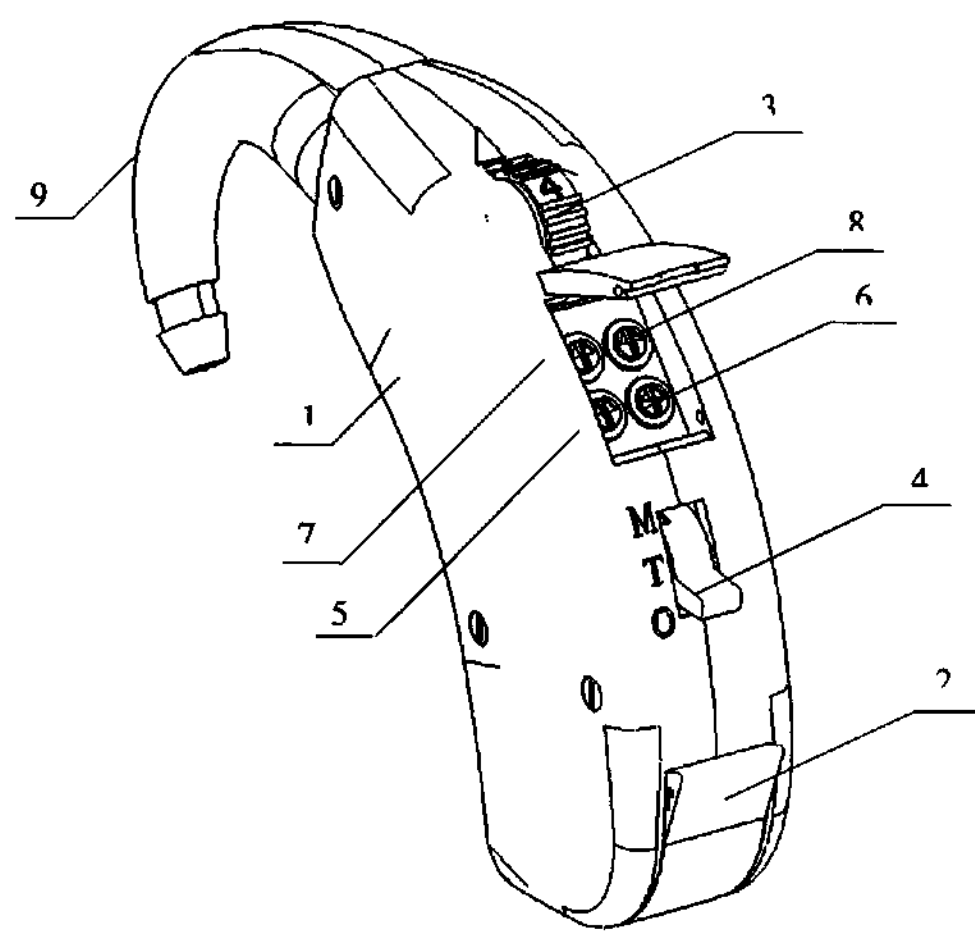

- 1 – корпус СА;
- 2 – выдвижной держатель элемента питания;
- 3 – регулятор усиления;
- 4 – переключатель "О-Т-М";
- 5 – регулятор тембра НЧ "N-H";
- 6 – регулятор тембра ВЧ "N-L";
- 7 – автоматический регулятор усиления AGC;
- 8 – регулятор выходного уровня звукового давления РС в СА "БРИЗ-Т41М", "БРИЗ-Т41Р";
– регулятор неоперативного акустического усиления G в СА "БРИЗ-Т42М". "БРИЗ-Т42Р".
– в СА "БРИЗ-Т31М" "БРИЗ-Т31Р" отсутствуют;
- 9 – звукопровод (крючок).

Рисунок 1 - Внешний вид СА

не. Неодл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

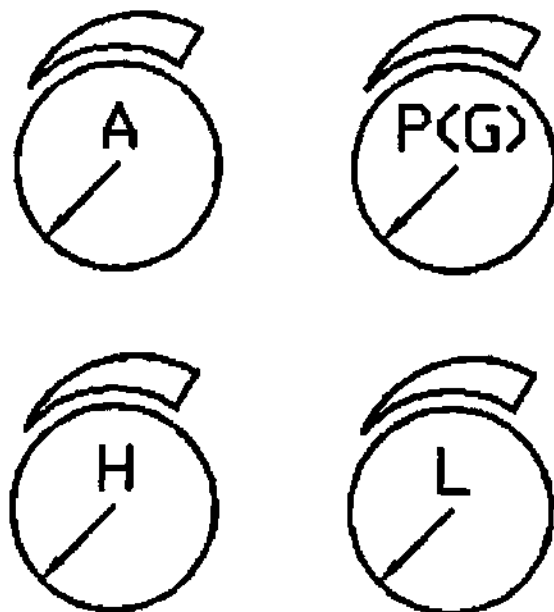

A – автоматический регулятор усиления "AGC";

P(G) – регулятор выходного уровня звукового давления "PC" или
неоперативный регулятор акустического усиления "G";

H – регулятор тембра в области низких частот "N-H";

L – регулятор тембра в области высоких частот "N-L".

Рисунок 2 – Положение триммеров (регуляторов)
при настройке СА при слухопротезировании

№. Мелодл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

4 Подготовка к работе

4.1 Установка или замена элемента питания.

4.1.1 Питание СА осуществляется от элемента питания- типа 675 или аналогичного.

4.1.2 Поместите элемент питания в выдвинутый из корпуса аппарата держатель так, чтобы знак "+", обозначенный на элементе питания, совпал со знаком "+" на держателе и задвиньте держатель в корпус аппарата.

4.1.3 Осторожно задвиньте держатель с элементом питания в корпус СА .

Примечание – Осторожно обращайтесь с держателем элемента питания, не применяйте силу.

4.1.4 В случае разряда элемента питания , использованный элемент питания следует удалить и установить новый. После замены элемента питания может пройти некоторое время, прежде чем установленный элемент питания заработает в полную силу.

4.2 Установка ушного вкладыша

4.2.1 Из комплекта СА выберите гибкий звукопровод с ушным вкладышем такого размера, чтобы он плотно входил в слуховой проход уха. Свободный конец гибкого звукопровода оденьте на жесткий звукопровод (крючок) СА, предварительно укоротив длину трубки до необходимого размера.

Наденьте жесткий звукопровод (крючок) СА на ушную раковину, а СА разместите за ухом.

Ушной вкладыш звукопровода введите в слуховой проход уха.

При больших потерях слуха рекомендуется пользоваться индивидуальными ушными вкладышами, сделанными по слепку с ушной раковины и слухового прохода. Индивидуальные ушные вкладыши можно заказать на пунктах слухового протезирования.

в Неподл.	Подпись и дата	Име № дубл	Взам. инв. №	Подпись и дата

ПОДПИСЬ

ВНИМАНИЕ! При снятии (или установке) ушного вкладыша с СА, необходимо держать СА за жесткий звукопровод (крючок) для исключения механического повреждения корпуса.

4.3 Подготовка СА к использованию

4.3.1 Предварительную настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

4.3.2 Регулировку громкости производите колесиком регулятора усиления 3 (рисунок 1), который имеет маркировку с цифрами от 1 до 4.

Минимальная громкость (вниз) соответствует цифре 1.

Максимальная громкость (вверх) соответствует цифре 4. Увеличивать громкость следует поворотом регулятора вверх; уменьшать – вниз.

При исправном СА, после установки регулятора усиления в положение максимального усиления, должен появиться характерный высокочастотный свист, который исчезает, если ушной вкладыш плотно прилегает к стенкам слухового прохода.

4.3.3 Установите регулятор усиления СА на минимальную громкость и поставьте выключатель аппарата в положение «М» (микрофон).

4.3.4 Поместите СА за ушной раковиной и вставьте ушной вкладыш плотно в наружный слуховой проход.

4.3.5 Установите регулятор усиления на наиболее благоприятный для Вас уровень громкости.

4.3.6 При разговоре по телефону установите переключатель режима работы в положение «Т». При необходимости, откорректируйте громкость принимаемых звуков с помощью регулятора усиления.

Име.Неподл.	Подпись и дата	Име.№ дубл	Име.№	Взам.име.№	Подпись и дата

Име	Лист	№ докум	Подпись	Дата

211-00-00 ПС

5 Использование СА

5.1 Рекомендации по использованию СА

5.1.1 Для эффективного использования СА необходимо некоторое время для привыкания к нему.

В течение первого месяца рекомендуется пользоваться СА дома, избегая шумных мест. Начинать тренировки следует с разговора с одним собеседником.

Попросите собеседника говорить медленно и правильно произносить слова.

Старайтесь концентрировать внимание на тех звуках, которые хотите расслышать

Следует научиться отделять звуки, которые Вы хотите расслышать, от всех остальных.

Во избежание утомления слуха в первые дни не рекомендуется пользоваться СА более получаса. Затем с каждым разом увеличивайте время ношения СА.

5.2 Прослушивание радио и телепередач

5.2.1 Слушать радио и телепередачи можно (при наличии индукционной петли), установив переключатель рода работ в положение «Т».

Включив радио, послушайте передачу в течении 20 минут с СА. Расстояние до приемника или телевизора определите сами, установив регулятор усиления в СА по наиболее комфортному звучанию. Первое дни время прослушивания должно быть невелико.

5.3 Участие в групповой беседе

5.3.1 У многих пользователей СА возникают сложности при общении в большой группе людей. Эту проблему можно преодолеть, сокращая расстояние между собой и говорящим, а также концентрируя свое внимание на

Подпись и дата

Имя № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

инв. № подл.

артикуляции и мимике собеседника. Старайтесь не слушать остальных и не стесняйтесь переспросить, если что не поняли.

Регулярное пользование СА в различной обстановке улучшит способность слышать и получать от СА максимум возможного.

5.4 Посещение общественных мест

5.4.1 Многие кинотеатры, лекционные залы, театры оборудованы специальными устройствами, преобразующими звук в электромагнитные колебания. Переключите СА переключателем рода работы в положение "Т", что позволит четко воспринимать звук.

5.4.2 Находясь в общественных местах располагайтесь в той части зала, где имеются наилучшие акустические условия, но не слишком близко к источнику звука. Обычно этим местом является середина зала.

5.5 Разговор по телефону

5.5.1 Переключите СА переключателем рода работы в положение "Т". При этом СА работает в режиме восприятия звуков, исходящих только от телефонной трубки.

5.5.2 Телефонную трубку следует держать около уха, на котором установлен слуховой аппарат, при этом не следует с силой прижимать телефонную трубку к уху. Попробуйте найти такое положение телефонной трубки, при котором телефонный сигнал слышен достаточно громко и четко.

ПОДПИСЬ

Подпись и дата	Имя № дубл	Взам. имя №	Подпись и дата	Имя № дубл	Взам. имя №	Подпись и дата	Имя № дубл	Взам. имя №

6 Техническое обслуживание

6.1 СА являются сложным электроакустическим устройством, поэтому техническое обслуживание и ремонт должны производиться специалистами ремонтных организаций.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ СЛУХОВОГО АППАРАТА.

6.2 Следует оберегать СА от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей и сырости, высокой температуры и органических растворителей.

Примечание. Если СА берется в руки, держать его следует над мягкой поверхностью, чтобы не повредить, если уроните.

6.3 Не используйте СА в непосредственной близости от источников мощных излучений, чтобы не повредить СА. Маломощные излучения, например, мобильная связь, радиооборудование, сигнализация охраны систем не опасны для СА, но могут временно повлиять на качество звука, что не является дефектом.

6.4 Хранить СА следует вдали от обогревательных приборов и в местах, недоступных малолетним детям, а также домашним животным.

6.5 Выключайте СА, когда им не пользуетесь, а также при длительном хранении СА, вынимайте элемент питания из держателя элемента питания.

6.6 Не подвергайте СА воздействию повышенной влажности. Не допускайте попадания на корпус СА воды, лака для волос, одеколона и т.п. Снимайте при посещении бани, душа, парикмахерской.

6.7 Соблюдайте гигиену слухового прохода.

6.8 Содержите ушной вкладыш в чистоте. Для его дезинфекции и очистке пользуйтесь теплой мыльной водой, предварительно сняв ушной вкладыш и трубку со СА. Прополощите его чистой водой и протрите насухо мягкой

не. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

тряпочкой. Капли воды, попавшие внутрь ушного вкладыша или трубки, должны быть удалены продуванием. Перед присоединением ушного вкладыша и трубки к СА убедитесь, что они сухие. Если трубка стала жесткой или хрупкой, ее необходимо заменить.

6.9 СА следует протирать сухой мягкой хлопчатобумажной материей.

6.10 Если отверстие микрофона забьется грязью, работа слухового аппарата может ухудшиться. Для очистки отверстия необходимо обратиться к специалисту.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЕ МИКРОФОНА
САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

6.11 Если при работе СА возникают трудности, попробуйте устранить их самостоятельно, используя таблицу 4.

Име. № докл.	Подпись и дата	Име. № дубл.	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Дата	211-00-00 ПС	Лист
							18

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Дата

7 Простейшие неисправности и методы их устранения

7.1 Если при работе СА возникают простейшие неисправности, попробуйте их исправить самостоятельно, используя таблицу 4.

При более сложных неисправностях обращайтесь за технической помощью в организации по ремонту изделий медицинской техники.

Таблица 4

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправности
Слабая слышимость.	Ручка регулятора усиления установлена на малую громкость.	Добейтесь нормальной громкости, поворачивая ручку регулятора усиления
	Засорился канал ушного вкладыша.	Прочистите канал ушного вкладыша.
Полностью отсутствует слышимость.	1 Аппарат не включен.	Включите аппарат с помощью выключателя питания.
	Неправильно вставлен элемент питания.	Вставьте элемент питания правильно.
Два коротких звуковых сигнала	Разрядился элемент питания	Замените элемент питания. Использованный элемент питания выбросите
При пользовании аппаратом слышен "свист".	Ушной вкладыш неплотно вставлен в слуховой проход.	Плотно вставьте ушной вкладыш в слуховой проход. При необходимости обратитесь на пункт слухового протезирования для подбора или изготовления индивидуального вкладыша.

на. Наполн.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл
Подпись и дата	Подпись и дата

8 Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный цифровой триммерный заушный

(наименование изделия)

«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р»,

«БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

(обозначение)

заводской номер _____

соответствует ТУ 9444-006-93307926-2007

(номер стандарта или технических условий)

и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

(личные подписи (оттиски личных клейм)
должностных лиц предприятия, ответственных
приемку изделия)

М.П.

за

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого аппарата требованиям технических условий ТУ 9444-006-93307926-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 1,5 года с момента отгрузки изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи потребителю, но в пределах гарантийного срока хранения.

Продолжительность установленных гарантийных сроков не распространяется на источники питания.

При отказе или обнаружении неисправности аппарата в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть предъявлен, (оформленный торгующей организацией) гарантийный талон предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники или заводу-изготовителю.

Гарантия не действует, если нарушен внешний вид пломбировки или установлен факт неправильной эксплуатации аппарата.

Имя, Подп. Подпись и дата

Имя № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, Подп.

Имя Подп. № докум. Подпись Дата
У Зам 08-08 23.6.08

211-00-00 ПС

Илуст

21

Копия

подпись

Приложение А

ОАО "завод "РИТМ" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой
наименование и тип изделия

электронный цифровой триммерный заушный
«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р»,
«БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

ТУ 9444-006-93307926-2007
номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Име. Методл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

Продолжение приложения А

ОАО "завод "РИТМ" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой
наименование и тип изделия

электронный цифровой триммерный заушный
«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р»,
«БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

ТУ 9444-006-93307926-2007

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Име.Неподл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Име.№ дубл	Подпись и дата

211-00-00 ПС

Лист

23

Продолжение приложения А

ОАО "завод "РИТМ" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Аппарат слуховой

наименование и тип изделия

электронный цифровой триммерный заушный

«БРИЗ-Т31М», «БРИЗ-Т31Р», «БРИЗ-Т41М», «БРИЗ-Т41Р»,
«БРИЗ-Т42М», «БРИЗ-Т42Р»

ТУ 9444-006-93307926-2007

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Лист

211-00-00 ПС

24

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью _____ в

генеральном _____ Горячев Г.Л.

директор

