

КУЛИН ВЕРНА
подпись

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор



Горячев

2007г.

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
ВОЗДУШНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЗАУШНОГО ТИПА
"БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р", "БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р",
"БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р", "БРИЗ-42М", "БРИЗ-42Р"

Паспорт

206-00-00 ПС

2007

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Содержание

	Лист
1 Назначение	3
2 Основные технические данные и характеристики	5
3 Комплектность	9
4 Техническое описание	11
5 Подготовка аппарата к работе и порядок работы	14
6 Использование СА	15
7 Техническое обслуживание и меры безопасности	17
8 Простейшие неисправности и методы их устранения	19
9 Свидетельство о приемке	20
10 Гарантии изготовителя	21
9 Приложение А. Гарантийный талон	22
10 Лист регистрации изменений	25

Подпись и дата	Име № дубл	Взам. инв. №	Подпись и дата	Име № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	206-00-00 ПС Аппараты слуховые электронные цифровые программируемые воздушного звукопроводения заушного типа «БРИЗ-21М», «БРИЗ-21Р», БРИЗ-22М», «БРИЗ-22Р», «БРИЗ-32М», «БРИЗ-32Р», «БРИЗ-42М», «БРИЗ-42Р» Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Попятков		12.02.04				
Провер.		Скворцова		12.02.04			2	25
Н. Контр.				12.02.04		ООО «КБ Аудиомаг»		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СА предназначены для индивидуального пользования.

При эксплуатации СА располагается за ухом пациента и соединяется со слуховым проходом при помощи гибкого звукопровода с ушным вкладышем.

СА по устойчивости к механическим воздействиям относятся к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

СА по последствиям отказа относятся к классу Г5 по РД-50-707 и ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от степени потенциального риска применения СА относятся к классу 2а ГОСТ Р 51609-2000.

Сертификат № РОСС RU. ИМ04. В06277

Срок действия – по 20.05.2010г.

Орган по сертификации – АНО "ЦСМИ ВНИИМП"

не. Наполн.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата
5	Зам	13-07	А.Г.	8.11.07
000 ЦСМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU , Дата				
206-00-00 ПС				Лист 4

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 СА при эксплуатации размещаются за ухом пациента. Внешний вид СА показан на рисунке 1. СА имеют ветрозащитный вход микрофона, просты и удобны в эксплуатации.

2.2 Питание СА осуществляется от элемента питания типа 675 с номинальным напряжением 1,4 В.

2.3 Основные параметры СА приведены в таблице 1.

Примечания

1 Параметры по п.п. 1 - 11; 13 таблицы 1 приведены при включении первой программы прослушивания.

2 Параметры по п. 12 таблицы 1 приведены при включении второй программы прослушивания для СА «БРИЗ-21М», «БРИЗ-21Р», «БРИЗ-22М», «БРИЗ-22Р».

3 Параметры по п. 12 таблицы 1 ³ / ~~2~~ приведены при включении третьей программы прослушивания для СА «БРИЗ-32М», «БРИЗ-32Р».

4 Параметры по п. 12 таблицы 1 приведены при включении четвертой программы прослушивания для СА «БРИЗ-42М», «БРИЗ-42Р».

2.4 В СА «БРИЗ-32М», «БРИЗ-32Р» и «БРИЗ-42М», «БРИЗ-42Р» при включении второй программы прослушивания полное акустическое усиление СА на частоте 1600 Гц должно уменьшаться на 10 дБ, а максимальный ВУЗД₉₀ должен уменьшаться на 6 дБ относительно норм установленных в п. п. 1 и 2 таблицы 1.

2.5 В СА «БРИЗ-42М», «БРИЗ-42Р» при включении третьей программы прослушивания, максимальный ВУЗД₉₀ и полное акустическое усиление на частоте 1600 Гц должны соответствовать п.п. 1; 2 таблицы 1.

2.6 Средний срок службы СА 5 лет.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Име.Неподл.	Подпись и дата	Взам.име.№	Име № дубл	Подпись и дата

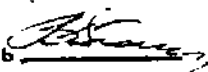
подпись 


Таблица 1

Наименование параметра	Тип аппарата							
	Бриз-21М	Бриз-21Р	Бриз-22М	Бриз-22Р	Бриз-32М	Бриз-32Р	Бриз-42М	Бриз-42Р
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Полное акустическое усиление, дБ:								
максимальное	55±4,5	65±4,5	55±4,5	65±4,5	55±4,5	65±4,5	55±4,5	65±4,5
на частоте 1600 Гц	45±4,5	55±4,5	45±4,5	55±4,5	45±4,5	55±4,5	45±4,5	55±4,5
2 Максимальное ВУЗД ₉₀ , дБ	125±4	131±4	125±4	131±4	125±4	131±4	125±4	131±4
3 Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30
4 Коэффициент компрессии, не менее	3	3	3	3	3	3	3	3
5 Верхняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500	6300±500
6 Нижняя граница усредненного частотного диапазона, Гц	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀	100± ¹⁰⁰ ₅₀
7 Глубина регулировки тембра в области низких частот, дБ, не менее	35	35	35	35	35	35	35	35

206-00-00 ПС

Инв.Неподл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв № дубл	Подпись и дата

КОПИЯ ВЕРНА

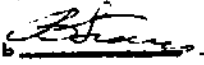
подпись 

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 Глубина регулировки тембра в области высоких частот, дБ, не менее	25	25	25	25	25	25	25	25
9 Коэффициент гармоник на частотах, %, не более: 500 Гц	5	5	5	5	5	5	5	5
1000 Гц	3	3	3	3	3	3	3	3
1600 Гц	3	3	3	3	3	3	3	3
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (при кривой А), дБ, не более	29	29	29	29	29	29	29	29
11 Потребляемый ток, мА, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12 Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	100	110	100	110	100	110	100	110
13 Время срабатывания АРУ, мс, не более	20	20	20	20	20	20	20	20
14 Время восстановления АРУ, мс, не более	120	120	120	120	120	120	120	120

206-00-00 ПС

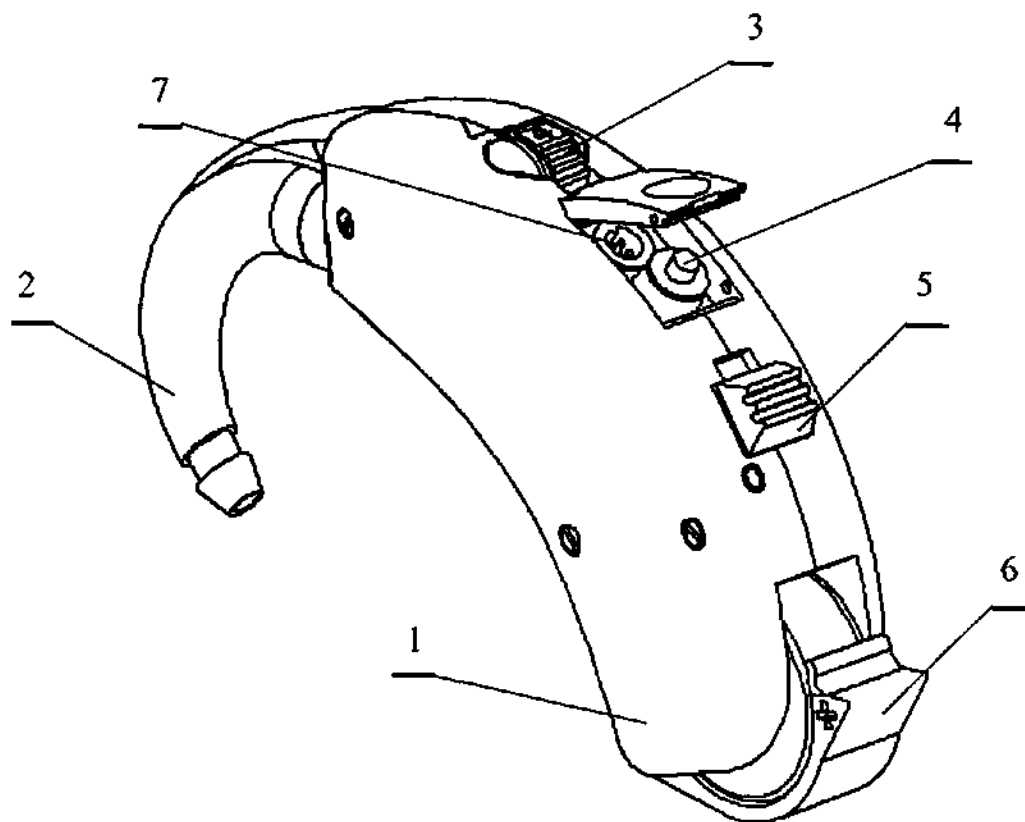

- 1 – корпус СА;
- 2 – звукопровод (крючок);
- 3 – регулятор усиления;
- 4 – кнопка переключения программ прослушивания;
- 5 – переключатель;
- 6 – держатель источника питания;
- 7 – разъем для программирования.

Рисунок 1 - Внешний вид СА "БРИЗ-21М", "БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р", "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32П", "БРИЗ-32Р"

Подпись и дата	
Име № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
№. Неподл.	

КОПИЯ СЕРПНА
подпись *Р. Р. Р.*

3 Комплектность

Комплект поставки СА должен соответствовать указанному в
таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество
1	2	3
1 Аппарат слуховой электронный цифровой программируемый воздушного звукопроводения заушного типа "БРИЗ-21М"	206-00-00	1
"БРИЗ-21Р"	206-00-00-01	
"БРИЗ-22М"	206-00-00-02	
"БРИЗ-22Р"	206-00-00-03	
"БРИЗ-32М"	206-00-00-04	
"БРИЗ-32Р"	206-00-00-05	
"БРИЗ-42М"	206-00-00-06	
"БРИЗ-42Р"	206-00-00-07	
Принадлежности		
2* Звукопровод № 1	180-06-00	1
3* Звукопровод № 2	180-06-00-01	1
4* Звукопровод № 3	180-06-00-02	1
5* Элемент питания 1,4В	Тип 675	2
6 Футляр	184-00-00	1
7 Коробка	126-00-14	1

Имя № дубл	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Имя № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Имя № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	

206-00-00 ПС

Пуст

Продолжение таблицы 2

1	2	3
8** Программа для настройки цифровых слуховых аппаратов	204-00-00 ПР	1
9** Кабель для программирования HI-PRO Style 3	Sonion, Дания	1
10** Интерфейс HI-PRO	HI-PRO, Madsen Electronics Дания	1
Эксплуатационная документация		
11 Паспорт на СА	206-00-00 ПС	1

Примечания

1 По согласованию с потребителем, СА может комплектоваться позициями принадлежностей, отмеченными * в любом наборе.

2 Позиции принадлежностей, отмеченные ** поставляются учреждениям здравоохранения и специалистам по слухопротезированию по отдельным заявкам.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
№. Методл.	

206-00-00 ПС

Лист

10

4 Техническое описание

4.1 В СА окружающие звуки, например, речь, музыка и т.д. воспринимаются миниатюрным микрофоном, преобразуются им в электрические сигналы, которые затем усиливаются и подводятся к электромагнитному телефону, где вновь преобразуются в акустические сигналы, поступающие по системе звукопроводов в наружный слуховой проход пользователя. Усиление с использованием цифровых технологий в нескольких частотных диапазонах (каналах) позволяет программировать параметры и настраивать СА для индивидуальной компенсации потерь слуха даже для самых трудных акустических ситуаций.

4.2 Внешний вид СА показан на рисунке 1.

На поверхности корпуса СА находятся следующие регуляторы и переключатели:

- регулятор усиления предназначен для установки необходимого уровня громкости;
- разъем для программирования предназначен для подключения кабеля для программирования;
- кнопка переключения программ прослушивания предназначена для смены поочередно программ прослушивания;
- выдвижной держатель источника питания предназначен для установки источника питания.

4.3 С помощью компьютера со специальным программным обеспечением и интерфейса настраиваются две, три, четыре программы прослушивания для конкретных СА.

Автоматически при включении СА включается программа 1. Переключение программ циклическое.

ив. Наполн.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

Для СА "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р", "БРИЗ-22М", "БРИЗ-21Р" при поочередном нажатии на кнопку переключения программ включается программа 2, а потом снова программа 1

1 → 2 → 1

Для СА "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р" при поочередном нажатии на кнопку переключения программ включается программа 2 затем программа 3, а потом снова программа 1.

1 → 2 → 3 → 1

Для СА "БРИЗ-42М", "БРИЗ-42Р" при поочередном нажатии на кнопку переключения программ включается программа 2 затем программа 3, а потом программа 4 и снова программа 1.

1 → 2 → 3 → 4 → 1

Чтобы быстро вернуть программу 1, необходимо выключить СА, а затем включить его снова.

В момент переключения программ раздаются звуковые сигналы (короткие гудки), количество которых соответствует номеру программы.

Примечание - Частота тона и уровень громкости звуковых сигналов настраиваются специалистом при слухопротезировании.

Рекомендуемая настройка программ прослушивания.

Для СА "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р", "БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р":

Программа 1 – настраивается на прослушивание в акустической обстановке согласно индивидуальных запросов потребителей.

Программа 2 – настраивается на прослушивание с помощью телефонной катушки.

Для СА "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р":

Программа 1 – настраивается на прослушивание в тихой обстановке.

Программа 2 – настраивается на прослушивание в шумной обстановке например: магазин, театр, транспорт и т.д.

Подпись и дата	
Име № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № подл.	

Программа 3 – настраивается на прослушивание с помощью телефонной катушки.

Для СА "БРИЗ-42М", "БРИЗ-42Р":

Программа 1 – настраивается на прослушивание в тихой обстановке.

Программа 2 – настраивается на прослушивание в шумной обстановке, например: магазин, театр, транспорт и т.д.

Программа 3 – настраивается на прослушивание в акустической обстановке согласно индивидуальных запросов потребителей.

Программа 4 – настраивается на прослушивание с помощью телефонной катушки.

Примечание - Порядок переключения и подбор режима прослушивания настраивается специалистом при слухопротезировании и записывается в таблице 3.

Таблица 3

Программа прослушивания	Рекомендуемое применение

Подпись и дата

Имя № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

на. Неподл.

5 Подготовка аппарата к работе и порядок работы

Поместите элемент питания в выдвинутый из корпуса аппарата держатель так, чтобы знак "+", обозначенный на элементе питания, совпал со знаком "+" на держателе и задвиньте держатель в корпус аппарата.

Из комплекта СА выберите гибкий звукопровод с ушным вкладышем такого размера, чтобы он плотно входил в слуховой проход уха. Свободный конец гибкого звукопровода оденьте на жесткий звукопровод (крючок) СА, предварительно укоротив длину трубки до необходимого размера.

Наденьте жесткий звукопровод (крючок) СА на ушную раковину, а СА разместите за ухом.

Ушной вкладыш звукопровода введите в слуховой проход уха.

При больших потерях слуха рекомендуется пользоваться индивидуальными ушными вкладышами, сделанными по слепку с ушной раковины и слухового прохода. Индивидуальные ушные вкладыши можно заказать на пунктах слухового протезирования.

ВНИМАНИЕ!

Повторное включение аппарата производить не менее чем через 3-5 сек. после его выключения.

Име. №подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

2	Зам	21-07	А-1	24.6.07
				Дата

206-00-00 ПС

Лист

14

6 Использование СА

6.1 Рекомендации по использованию СА

6.1.1 Следует иметь ввиду, что использование СА, как правило, дает хороший результат только после предварительной, нередко длительной, тренировки. Тренировку рекомендуется разделить на несколько этапов. Начинайте использование СА в простых условиях.

6.2 Разговор дома с собеседником.

6.2.1 В течение первого месяца рекомендуется пользоваться СА дома, в привычной обстановке. Начинать тренировки следует с разговора с одним собеседником. Установите с помощью кнопки 4, рисунок 1, акустическую программу для тихих мест (программа 1) и наиболее благоприятную громкость и приготовьтесь слушать.

Попросите собеседника говорить медленно и правильно произносить слова.

Сосредоточьтесь на беседе. Старайтесь концентрировать внимание на тех звуках, которые хотите расслышать. Следует научиться отделять звуки, которые Вы хотите слушать от всех остальных.

Во избежание утомления слуха в первые дни не рекомендуется пользоваться СА более получаса. Почувствовав усталость, снимите СА и отдохните. Затем продолжайте тренироваться, с каждым разом увеличивая время ношения СА.

Постепенно, по мере привыкания, переходите к использованию СА в более сложных бытовых условиях.

6.3 Прослушивание радио и телепередач

6.3.1 Слушать радио и телепередачи можно, установив с помощью кнопки 4, рисунок 1, акустическую программу:

- прослушивания с помощью телефонной катушки (смотри п. 4.3);

Подпись и дата	
Имя № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
№. Находл.	

Включив радио или телевизор, послушайте передачу типа "Вести" в течение 15-20 минут с СА. Расстояние до приемника или телевизора определите сами, установив регулятор усиления в СА по наиболее комфортному звучанию. Время прослушивания в первые дни также должно быть невелико.

6.4 Участие в групповой беседе

6.4.1 У многих пользователей СА возникают сложности при общении в большой группе людей. Эту проблему можно преодолеть, сокращая расстояние между собой и говорящим, а также концентрируя свое внимание на артикуляции и мимике собеседника. Старайтесь не слушать остальных. Однако, если что не поняли, никогда не стесняйтесь переспросить.

Регулярное пользование СА в различной обстановке улучшит способность слышать и получать от слухового аппарата максимум возможного.

6.5 Посещение общественных мест

6.5.1 Находясь в театре, концертном зале и других общественных местах, необходимо выбрать программу прослушивания в шумной обстановке (программу 2) СА "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р", "БРИЗ-42М", "БРИЗ-42Р", что позволит четко воспринимать звук. Располагайтесь в той части зала, где имеются наилучшие акустические условия, но не слишком близко к источнику звука, обычно этим местом является середина зала.

6.6 Разговор по телефону

6.6.1 Используйте программу "прослушивание с помощью телефонной катушки". При этом СА работает в режиме восприятия звуков, исходящих только от телефонной трубки.

Телефонную трубку следует держать около уха, на котором установлен СА, при этом не следует с силой прижимать телефонную трубку к уху. Попробуйте найти такое положение телефонной трубки, при котором телефонный сигнал слышен достаточно громко и четко.

не. Неодл.	Подпись и дата	
	Име № дубл	
	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	

7 Техническое обслуживание и меры безопасности

7.1 СА является сложным электроакустическим устройством, поэтому техническое обслуживание и ремонт должны производиться специалистами ремонтных организаций.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ СЛУХОВОГО АППАРАТА

7.2 Следите за чистотой ушного вкладыша, не допускайте загрязнения его канала, иначе слышимость может ухудшиться.

Протирайте СА только мягкой тканью или ватой.

НЕДОПУСТИМО ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ.

7.3 Оберегайте СА от ударов, высокой температуры, сырости, повышенной влажности и органических соединений.

Не допускайте попадания на корпус СА воды, лака для волос, одеколона, различных косметических кремов и т.п. Снимайте СА при посещении бани, душа, парикмахерской.

7.4 Выключайте СА, когда им не пользуетесь - это продлит время работы элемента питания.

Вынимайте элемент питания из отсека питания на ночь и при длительном хранении СА. При хранении элементов питания нельзя допускать замыканий крышки и корпуса элемента питания между собой металлическими предметами.

7.5 Если пользуетесь элементами питания типа 675 (батарейка) не пытайтесь перезаряжать использованные элементы питания, они не перезаряжаются.

7.6 Храните СА и элементы питания в местах недоступных для детей и животных.

Подпись и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

подпись

7.7 Ушные вкладыши и корпус СА изготовлены из материалов, разрешенных для применения в здравоохранении. Содержите ушной вкладыш в чистоте. Для его дезинфекции и очистки пользуйтесь теплой мыльной водой, предварительно сняв ушной вкладыш и трубку со слухового аппарата. Прополощите его чистой водой и протрите насухо мягкой тряпочкой. Капли, попавшие внутрь ушного вкладыша и трубки, должны быть удалены продуванием. Перед присоединением ушного вкладыша и трубки к СА убедитесь, что они сухие.

7.8 Если отверстие микрофона забьется грязью, работа СА может ухудшиться. Для очистки отверстия необходимо обратиться к специалисту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЕ МИКРОФОНА САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Имя, Фамилия	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подпись и дата

206-00-00 ПС

Лист

18

8 Простейшие неисправности и методы их устранения

8.1 Если при работе СА возникают простейшие неисправности, попробуйте их исправить самостоятельно, используя таблицу 4.

При более сложных неисправностях обращайтесь за технической помощью в организации по ремонту изделий медицинской техники.

Таблица 4

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправности
Слабая слышимость.	Ручка регулятора усиления установлена на малую громкость.	Добейтесь нормальной громкости, поворачивая ручку регулятора усиления
	Засорился канал ушного вкладыша.	Прочистите канал ушного вкладыша.
Полностью отсутствует слышимость.	1 Аппарат не включен.	Включите аппарат с помощью выключателя питания.
	Неправильно вставлен элемент питания.	Вставьте элемент питания правильно.
Два коротких звуковых сигнала	Разрядился элемент питания	Замените элемент питания. И использованный элемент питания выбросите
При пользовании аппаратом слышен "свист".	Ушной вкладыш неплотно вставлен в слуховой проход.	Плотно вставьте ушной вкладыш в слуховой проход. При необходимости обратитесь на пункт слухового протезирования для подбора или изготовления индивидуального вкладыша.

Подпись и дата	
Име №	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Исх. №	

9 ⑤
 Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный цифровой "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р"
 программируемый заушный "БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р",
 "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р",
 "БРИЗ-42М", "БРИЗ-42Р"

(наименование изделия)

(обозначение)

заводской номер _____

соответствует ТУ 9444-003-93307926-2007

(номер стандарта или технических условий)

и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

М.П.

 (личные подписи (отгиски личных клейм)
 должностных лиц предприятия, ответственных
 за приемку изделия)

Подпись и дата	
Имя № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
в Неподл.	

206-00-00 ПС

Лист

20

10 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого аппарата требованиям технических условий ТУ 9444-003-93307926-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 1,5 года с момента отгрузки изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи потребителю, но в пределах гарантийного срока хранения.

Продолжительность установленных гарантийных сроков не распространяется на источники питания.

При отказе или обнаружении неисправности аппарата в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть предъявлен, (оформленный торгующей организацией) гарантийный талон предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники или заводу-изготовителю.

Гарантия не действует, если нарушен внешний вид пломбировки или установлен факт неправильной эксплуатации аппарата.

в. Наполн.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. №	Подпись и дата
000 ЦИРМИ ИЗМ. Лист 6. 2008 08-08 INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU № докум. Подпись Дата 23.6.08 206-00-00 ПС Лист 21				

Приложение А

ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Москва, 127238, Дмитровское шоссе, 81.
~~ООО «КБ Аудиомаг», 124195, Москва, ул Беломорская, д.14, корп.2~~ ⑤

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный

наименование и тип изделия

цифровой программируемый заушный "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р",

"БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р", "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р", "БРИЗ-42М",

"БРИЗ-42Р" ТУ 9444-003-93307926-2007

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Име. неподл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206-00-00 ПС

Лист

22

Продолжение приложения А
 ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Москва, 127238, Дмитровское шоссе, 81.
~~ООО «КБ Аудиомаг», 124195, Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2~~ ⑤

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный
наименование и тип изделия
цифровой программируемый заушный "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р",
"БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р", "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р", "БРИЗ-42М",
"БРИЗ-42Р" ТУ 9444-003-93307926-2007
номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать
 руководителя ремонтного
 предприятия

Подпись и печать
 руководителя учреждения
 владельца

Подпись и дата

Име. Подп. бл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. Неподр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

206-00-00 ПС

Лист

23

подпись

Продолжение приложения А
ОАО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» Москва, 127238, Дмитровское шоссе, 81.
~~ООО «КБ Аудиомаг», 124195, Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2~~ ⑤

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный
наименование и тип изделия
цифровой программируемый заушный "БРИЗ-21М", "БРИЗ-21Р",
"БРИЗ-22М", "БРИЗ-22Р", "БРИЗ-32М", "БРИЗ-32Р", "БРИЗ-42М",
"БРИЗ-42Р" ТУ 9444-003-93307926-2007
номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата	
Име № дубл	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. Метод.	

Прошито, пронумеровано

печатью 25 лист

специальный

директор

М.П.

Конструкторского бюро

Аудиоскопа

