

Общество с ограниченной ответственностью "Ортомода"

тел.: 8 (496) 403 19 35
140301, МО, г. Егорьевск, Смычка ул., дом 28

ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Р/счет 40702810105000000013
БИК 044552710
ИНН 5011031994

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения обуви ортопедической малосложной:

- Всегда правильно подбирайте обувь по размеру и полноте, учитывайте сезонность.
- Новую обувь следует пропитать специальными средствами и начистить сразу после покупки.
- Помните, кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. она не является непромокаемой (как, например, резиновая)
- Не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, т.к. это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви.
- Грязную обувь сначала следует очистить специальной щеткой, влажной салфеткой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь потом можно ухаживать за кожей.
- Никогда не сушите мокрую обувь на нагретых поверхностях, или вблизи открытого огня. Сушите обувь при комнатной температуре, используя специальные распорки, или предварительно плотно набив её бумагой. Просушивайте съёмные вкладки стельки.
- Чистите обувь, по крайней мере, раз в неделю.
- Обувь из нубука и замши следует чистить в сухом состоянии с помощью специальной щётки.
- Кожаную обувь очищают от пыли и грязи при помощи влажной салфетки, смоченной в мыльном растворе.
- После просушивания обувь необходимо обработать. Кожаную обувь обрабатывайте кремом, обувь из нубука и замши - спреем с водоотталкивающим эффектом.
- Не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям, где имеется техническая соль, избегайте воздействия на материал верха обуви щелочей, кислот и других активных растворителей.
- Не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, которые, как правило, приводят к отрыву подошвы, фурнитуры.
- При обувании обязательно расшнуровывайте шнурки, застёжки и всегда пользуйтесь рожек для обуви, никогда не снимайте обувь, наступая на задник.
- Не надевайте закрытую обувь на голую ногу, т.к. это не гигиенично и может быть причиной появления мозолей, дефектов кожи и мелких ран
- Изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом
- Следует учитывать, что при повышенной потливости ног или при намокании, обувь может незначительно краситься изнутри.