

WORLD
HUMAN
DIMENSION
FOUNDATION



ФОНД
«МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»

ИЗДЕЛИЯ КОМПРЕССИОННЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВ «МГИ – ДЖОБСТ»

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Изделия изготавливаются из эластичных тканей по типовым формам и размерам участков тела пациента, которые должны находиться под давлением (компрессией) и будут закрыты изделиями, в соответствии со спецификацией и требованиями ТУ 9396 – 004 – 40151795 – 2002.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Изделия предназначены для лечения и профилактики рубцовых контрактур, келоидных и гипертрофических рубцов, а также для применения после операций мамопластики и липосакции, в других случаях, когда показана компрессионная терапия.

Применение изделий должно происходить под непрерывным наблюдением лечащего врача или врача - консультанта.

НОШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

1. Если иное не указано врачом, изделия следует носить 23 часа в сутки (целесообразно иметь два комплекта одних и тех же изделий – пока один носится, другой стирается и сушится). Изделия следует снимать перед принятием ванны и проведением лечебных процедур, например, перед смазыванием кожи кремом. Маски необходимо снимать во время еды.
2. Привыкание пациента к компрессии занимает первые два – три дня ношения компрессионных изделий.
3. Через каждые два – три месяца непрерывного ношения изделий необходимо на консультации у врача проверять степень их прилегания к телу: уменьшение компрессии возможно из-за накопления остаточного растяжения и потери эластичности ткани, из-за похудения, а увеличение компрессии – из-за естественного роста тела (у детей и подростков) и увеличения полноты тела. Возможно повторное изготовление изделий, в том числе, для пациентов, чьи контуры и общее состояние изменилось, либо испытывающих проблемы с ношением изделий. Перед повторным заказом целесообразно проверить необходимость в застёжках – молниях, исключение которых повысит давление на те места, где были эти молнии.
4. Во время ношения компрессионных изделий следует продолжать выполнение упражнений и вести нормальную жизнь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

1. Компрессионные изделия необходимо ежедневно стирать для удаления кислот и солей, выделяемых кожей. Это не только препятствует заносу инфекции, но и сохраняет изделия на более длительный срок. Стирать нужно руками в тёплой воде с растворённым в нём «Детским» мылом при температуре не выше 40 градусов. Затем следует тщательно прополоскать изделие в холодной воде до полного удаления мыла, что предотвращает возможные аллергические реакции кожи и способствует сохранению эластичности ткани изделия.
2. Изделия следует сушить при комнатной температуре на плоской горизонтальной поверхности без предварительного выкручивания, удалив излишек влаги промоканием с помощью полотенца. Во избежание усадки и потери эластичности ткани изделия не должны находиться вблизи источника тепла (батареи отопления, открытого огня, на солнце и т.д.).
3. При надевании не тяните за швы и резинку, поскольку это может вызвать деформацию изделия или снижение эластичности ткани.
4. На длинных рукавах рубашек нанесена метка, соответствующая линии локтя. При надевании следите за тем, чтобы метка располагалась на указанном уровне. Это обеспечит правильное распределение давления в области руки.
5. При выполнении различных работ, связанных с физическими усилиями, поверх лечебных перчаток целесообразно надевать резиновые или хлопчатобумажные защитные перчатки.
6. При необходимости пользуйтесь увлажняющим кремом на водной основе. Мази на жировой основе отрицательно влияют на эластичность ткани.

