


945150

код продукции

**ХОДУНОК
НА КОЛЁСИКАХ
ПАСПОРТ
СР 005.000 ПС**

009

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

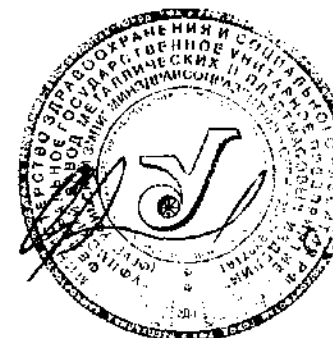

ДИРЕКТОР
ОСМУЧЕВ


1. Общие сведения об изделии

Ходунок на колёсиках предназначен для использования его в качестве дополнительной опоры при самостоятельном передвижении пользователя внутри и вне помещений.

Габаритные размеры изделия:

Высота 450 – 650 мм, ширина – не более 550 мм, длина – не более 650 мм.

Общий вид ходунка

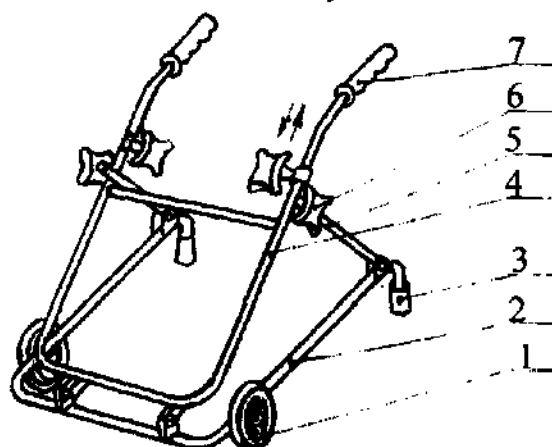

1 – колесо

2 – рама нижняя

3 – наконечник

4 – рама верхняя

5 – распорка

6 – регулировочная
рукоятка

7 – ручка

1.1 Подготовка изделия к работе

Для раскладывания ходунка необходимо установить распорку (5) в рабочее положение, ввинтить рукоятку (6).

Для регулирования по высоте положение ручек (7) необходимо отвинтить регулировочные рукоятки (6) на верхней раме (4), выдвинуть рукоятки с ручками (7) по стрелке на нужную для пользователя высоту, завинтить регулировочные рукоятки (6).

2. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ходунка ТУ9451-032-03151538-2006 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи ходунка пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену ходунка бесплатно.

3. Свидетельство о приёмке

Ходунок изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП _____

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« ____ » _____ 2011 год.
число, месяц, год

4. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия

Срок действия:

Орган по сертификации:

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:


Башкортостан, 450069,


г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» минздравсоцразвития

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа

Подпись

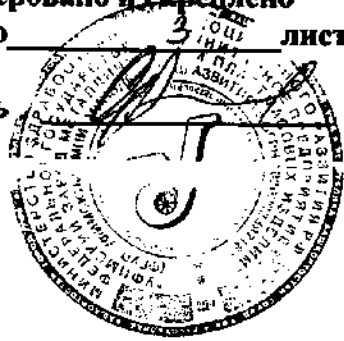


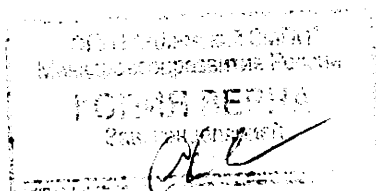

945150

код продукции

ХОДУНОК НА КОЛЁСИКАХ ПАСПОРТ СР 008.000 ПС

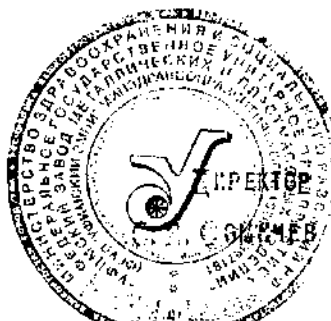


1. Общие сведения об изделии

Ходунок на колёсиках предназначен для использования его в качестве дополнительной опоры при самостоятельном передвижении пользователя внутри и вне помещений.

Габаритные размеры изделия:

Высота 650 - 950 мм, ширина – не более 650 мм, длина – не более 750 мм.

Общий вид ходунка

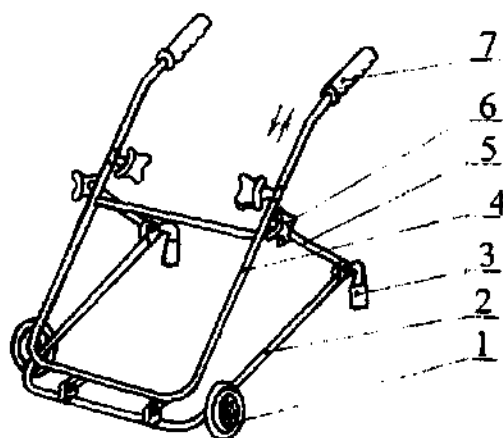

1 – колесо

2 – рама нижняя

3 – наконечник

4 – рама верхняя

5 – распорка

6 – регулировочная
рукоятка

7 – ручка

1.1 Подготовка изделия к работе

Для раскладывания ходунка необходимо установить распорку (5) в рабочее положение, ввинтить рукоятку (6).

Для регулирования по высоте положение ручек (7) необходимо отвинтить регулировочные рукоятки (6) на верхней раме (4), выдвинуть рукоятки с ручками (7) по стрелке на нужную для пользователя высоту, завинтить регулировочные рукоятки (6).

2. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ходунка ТУ9396-032-03151538-2001г. при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи ходунка пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену ходунка бесплатно.

3 Свидетельство о приёмке

Ходунок изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП _____
подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« ____ » _____ 2011 год.
число, месяц, год

4. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия

Срок действия:

Орган по сертификации:

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,
г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6
ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития
России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел: (347) 267-16-93

Отдел маркетинга тел: (347) 267-16-03

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел: (347) 267-16-13

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____

Подпись _____

