


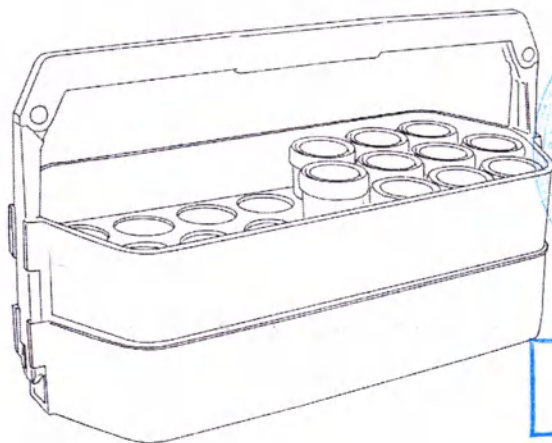

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

## **Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 по ГИКС.942849.103 ТУ**

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является эксплуатационным документом на «Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 по ГИКС.942849.103 ТУ».

Перед началом эксплуатации необходимо изучить и при работе соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в РЭ.

Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется.

При покупке необходимо проверить комплектность, отсутствие механических повреждений и убедиться, что в РЭ поставлены штамп ОТК, дата упаковки.

### **1. Описание**

#### **1.1 Назначение контейнера**

1.1.1 «Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 по ГИКС.942849.103 ТУ» (в дальнейшем - контейнер) предназначен для переноса баночек диаметром от 40 до 50 мм и высотой от 55 до 75 мм в лечебно-профилактических учреждениях.

#### **1.2 Условия эксплуатации**

1.2.1 Контейнер эксплуатируется в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С;
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 °С, не более 80%.

#### **1.3 Основные параметры**

- 1.3.1 Габаритные размеры контейнера не более - (530x200x300) мм.
- 1.3.2 Масса контейнера не более - 2,0 кг.

#### 1.4 Характеристики

1.4.1 Контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287-113 (Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения) МЗ РФ при температуре не более 65 °С.

1.4.2 Наружные и внутренние поверхности контейнера устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 и 1% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306.

1.4.3 Календарный срок службы контейнера не менее 2 лет с даты начала эксплуатации до момента достижения предельного состояния.

Критерием предельного состояния контейнера является наличие трещин, раковин, вздутий, расслоений.

#### 2. Комплектность

2.1 Контейнер для переноса баночек для анализов КРБ-01 по ГИКС.942849.103 ТУ - 1 шт. (см. рисунок 1).

В состав контейнера входят:

- Корпус - 2 шт.
- Ложемент - 2 шт.
- Ручка (сборная) - 1 шт.

Состав ручки:

- Перекладина - 1 шт.
- Защелка - 2 шт.
- Заклёпка - 2 шт.
- Ось - 2 шт.

2.2 Руководство по эксплуатации ГИКС.942849.103 РЭ - 1 шт.

#### 3. Указание мер безопасности

3.1 К использованию контейнера приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

3.2 Оберегайте контейнер от ударов, от контакта с открытым огнем.

3.3 Температура воздействия на поверхности должна быть не выше (75<sup>+2</sup>) °С.

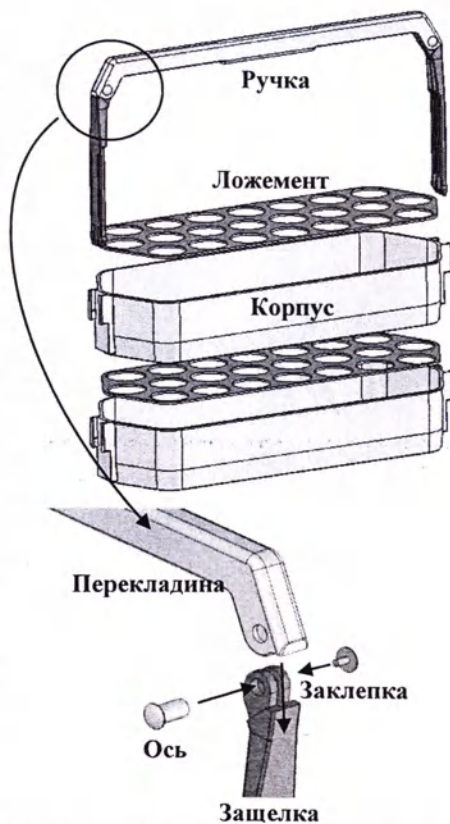


Рисунок 1  
Комплектность контейнера

3.4 Все работы выполняйте с защитой кожи рук резиновыми перчатками по МУ-287-113.

#### 4. Подготовка к работе и сборке

4.1 После хранения контейнера в холодном помещении или перевозки его при температуре ниже 10 °С перед сборкой дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 30 минут.

4.2 После прогрева при комнатной температуре можно приступить к сборке контейнера и его использования.

4.3 Дезинфекцию контейнера проводить в соответствии с рекомендациями МУ 287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 и 1% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306.

#### 5. Порядок сборки

Проверка комплектности (см. рисунок 2).

Собрать ручку (если ручка находится в разобранном виде).

- 1 Установить ложемент(ы) в корпус(а).
- 2 Установить корпуса с ложементами друг на друга (после загрузки нижнего корпуса с ложементом баночками, заполненными или предназначенными для сбора материалов на анализ).
- 3 Зафиксировать ручку в корпусе при помощи защёлки.

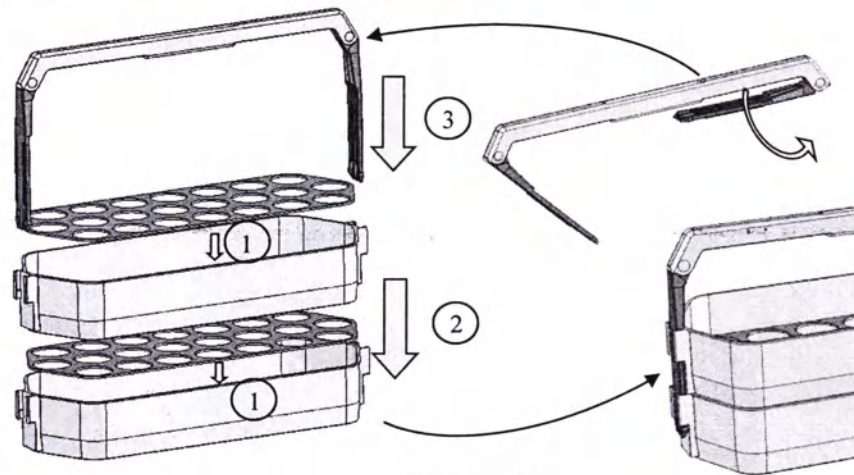


Рисунок 2  
Проверка комплектности

#### 6. Транспортирование и хранение

6.1 Контейнеры в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150.

**6.2 Условия транспортирования:**

- температура окружающей среды от плюс 50 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

**6.3** При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

**6.4** Условия хранения на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

**6.5** Хранение контейнера осуществляется в упаковке изготовителя при условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С.

**7. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание контейнера сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений составных частей изделия, удалению загрязнений, дезинфекции после каждого использования. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению надежности переносу баночек, дефектные составные части или заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу у производителя изделия, или утилизируются.

**8. Утилизация**

После окончания эксплуатации изделия подлежат утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

**9. Гарантии изготовителя**

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие качества контейнера требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем РЭ.

**9.2** Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

**9.3** Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты упаковывания.

**10. Свидетельство о приемке**

Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 по ГИКС.942849.103 ТУ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942849.103 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08845 от \_\_\_\_\_**



Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»  
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район,  
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25  
Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29  
E-mail: lpu@elamed.com  
lpu.elamed.com

ОМ № 23.74.11  
21.08.2019г.