

ОКП 94 51 50

**КРЕСЛО-СТУЛ
С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ**

СР 154; СР 154-01; СР 154-02; СР 154-03; СР 154-04

Руководство по эксплуатации

СР 154 РЭ



ФГУП "Уфимский центр
Минздравсоцразвития России"

КОПИЯ ВЕРНА
Зав. канцелярией

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным документом, совмещающим в себе руководство по эксплуатации и паспорт, удостоверяющий гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики кресла-стула с санитарным оснащением СР 154 ТУ9451-030-03151538-2003.

РЭ содержит двенадцать разделов, включая:

С.

1. Описание и работа.	3
2. Использование по назначению.	5
3. Уход и техническое обслуживание.	6
4. Возможные неисправности и способы их устранения.	6
5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.	7
6. Свидетельство об упаковке.	8
7. Свидетельство о приеме и продаже.	9
8. Хранение.	10
9. Транспортирование.	10
10. Сведения о сертификации.	10
11. Сведения о рекламациях.	10
12. Рисунки.	11-18

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Кресла-стулья с санитарным оснащением СР 154 и СР154-01 (далее кресла-стулья) предназначены для использования их в туалетных или других помещениях.

Кресла-стулья СР154-02; СР154-03; СР154-04 предназначены для передвижения пользователей с нарушением или утратой функций опорно-двигательного аппарата и также выполнения необходимых манипуляций в туалетных или других помещениях.

1.2 Основные технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Обозначение кресла-стула				
	СР 154	СР 154-01	СР 154-02	СР 154-03	СР 154-04
Длина, мм, не более	650	650	1040	1150	1150
Ширина, мм, не более	560	560	560	660	660
Высота, мм, не более	930	930	930	930	930
Ширина сиденья, мм, не более	420	420	420	420	420
Глубина сиденья, мм, не более	450	450	450	450	450
Грузоподъемность, кг, не более	100	100	100	100	100
Масса, кг, не более	12	12	18	25	25
Наружный диаметр колеса, мм			125		
Наружный диаметр большого колеса, мм *				580	580
Наружный диаметр малого колеса, мм				125	125
Наружный диаметр вспомогательного колеса, мм **				125	125

Примечание :

*цельнолитая шина по ТУ 2500-376-00152106-94

**для исполнения СР 154-04

1.3 Состав изделия

На рисунке 1 изображено кресло-стул CP154- с указанием его основных частей.

На рисунке 2 изображено кресло-стул CP154-01- с указанием его основных частей

На рисунке 3 изображено кресло-стул CP154-02- с указанием его основных частей

На рисунке 4 изображено кресло-стул CP154-03- с указанием его основных частей

На рисунке 5 изображено кресло-стул CP154-04- с указанием его основных частей

1.3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1) Кресло-стул | - 1 шт. |
| 2) Подушка накладная | - 1 шт. |
| 3) Руководство по эксплуатации | - 1 экз. |

1.4 Устройство и работа

Кресло-стул представляет собой стул CP154; CP154-01 или стул на колёсах (CP154-02; CP154-03; CP154-04), с жёстким сиденьем, имеющим гигиеническое отверстие.

Конструкцией изделия предусмотрено:

- комфортное размещение в нём пользователя;
- возможность выполнения всех необходимых манипуляций пользователем, включая наезд на унитаз задним ходом (без судна подкладного);
- возможность закрытия гигиенического отверстия полумягким сиденьем;
- закрепление судна под сиденье;
- откидывание подлокотников;
- регулирование высоты подножек;
- поворот опор для ног в вертикальное положение;
- разборка кресла-стула с целью уменьшения его габаритов при транспортировке и хранении.

2 Использование по назначению

2.1 Указание мер безопасности

При посадке в кресло-стул и высадке из него колёса должны быть зафиксированы тормозами.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я эксплуатация кресла-стула с неисправными тормозами.

Не разрешается вставать на подножки при посадке в кресло-стул и высадке из него.

2.2 Подготовка к эксплуатации

Кресло-стул поставляется в частично разобранном виде.

Соберите кресло по схеме (рисунок 6). Вставьте в две полурамы 7 штангу 6 и закрепите болтом с шайбой 5 и гайкой 4 в двух местах. Винты сиденья- 1 вставьте в пазы кронштейнов 2 полурам и закрепите гайкой 3 в 4-х местах. Стойки спинки 8 прикрепите к полурамам винтом с шайбой 9 и гайкой с шайбой 10 в четырёх местах.

Для присоединения подножки 2 (рисунок 10) поверните ручку 1 и, надев подножку на штыри 3, отпустите ручку, зафиксировав тем самым положение подножки. Настройте её длину индивидуально по размеру голени, используя крепление 4.

2.3 Использование судна (рисунок 7)

Для установки судна 5 встаньте сзади кресла-коляски. Заведите судно под сиденье 1 так, чтобы его боковые направляющие легли на полозья 3. Скольжением вперёд до упора вставьте судно под сиденье. При этом прижимные ролики 4 будут фиксировать его от выпадения.

П о м и т е судно необходимо вставлять под сиденье до упора.

Два полоза крепятся к сиденью 4-мя болтами и легко снимаются и устанавливаются.

2.4 Изменение габаритов кресла-стула

Для разворота в узких местах могут быть сняты подножки. При этом ноги можно поставить на опорный ремень .

2.5 Использование тормоза (рисунок 9)

Тормоз большого колеса состоит из системы рычагов. При повороте рукоятки 1 происходит прижим рычага 3 к шине колеса 2, при этом исключается самопроизвольное расторможение колеса.

2.6 Присоединение вспомогательных колёс (рис.8)

Для проезда в узких местах используются вспомогательные колёса.

Вспомогательные колёса (3) вставляются в полурамы и закрепляются болтом (4) М6х30.

ВНИМАНИЕ. Если Вы хотите вставить вспомогательные колёса и при этом пользоваться большими колёсами (1), следите за тем, чтобы тормоза (2) вспомогательных колёс были обращены вовнутрь коляски.

3 Уход и техническое обслуживание

3.1 При эксплуатации кресло-коляска требует определенного ухода.

Периодически необходимо проводить дезинфекцию сиденья, спинки, подлокотников моющим раствором с добавкой перекиси водорода, 1% раствора хлорамина.

3.2 Поверхности металлических деталей необходимо предохранять от ударов твердых и острых предметов.

4 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможная неисправность	Возможная причина	Методы устранения
1 Нет затормаживания большого колеса	Ослабление и смещение крепления тормоза кресла-стула	Растормозить колесо. Ослабить болты крепления тормоза на трубе рамы. Сдвинуть тормоз по трубе до положения, при котором торможение происходит, затянуть болты крепления

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурс изделия до первого _____

среднего, календарного

ремонта _____

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы 5 лет, в том числе срок хранения _____

2 года _____ в упаковке изготовителя _____

в консервации (упаковке) изготовителя

в складских помещениях _____

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

Межремонтный ресурс _____

параметр, характеризующий наработку

При _____ ремонте в течение срока службы 5 лет

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя (поставщика) Изготовитель гарантирует _____

соответствие кресла-стула СР 154 требованиям _____

ТУ 9451-030-03151538-2003 при соблюдении условий транспортирования, _____

хранения и эксплуатации _____

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем _____

6 Свидетельство об упаковке

Кресло-стул с санитарным оснащением СР 154 №
наименование изделия обозначение заводской номер

Упаковано ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Росздрав
наименование ЛАК или изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

« » 200 год
число месяц год

7 Свидетельство о приёме и продаже

Кресло-стул с санитарным оснащением CP 154 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

МП

подпись лица ответственного за приёмку

Ф.И.О. Должность

« _____ » _____ 200__ год
число месяц год

Дата продажи _____

(штамп, подпись организации реализующей продукцию)

8 Хранение

8.1 Кресло-стул в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от $+40^{\circ}$ до -50° и относительной влажности 80% при 15°C .

8.2 Недопустимо содержание в воздухе помещения газов, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование кресла-стула осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от $+50^{\circ}$ до -50°C и относительной влажности воздуха 80% при 15°C .

10 Сведения о сертификации

10.1 Кресла-стулья сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р 51081-97. ГОСТ Р 51083-97

11 Сведения о рекламациях

11.1 Конструкция кресла-стула постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

11.2 Все замечания и предложения по качеству кресел-стульев просим направлять по адресу:

Республика Башкортостан, 450069,


г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПБ» Минздравсоцразвития России

или по телефонам в г. Уфе (347)

а) общий отдел по маркетингу 267-16-03


б) общий отдел ОТК 267-16-13.

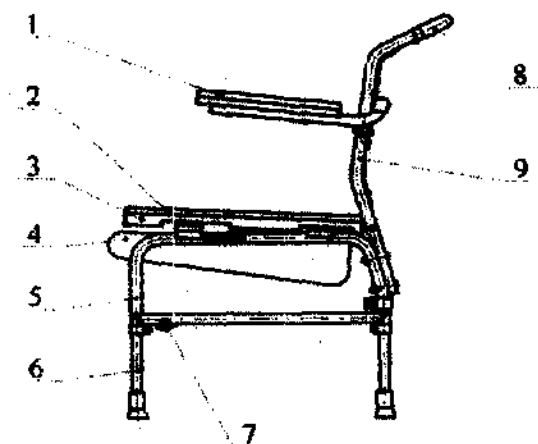

1-подлокотник
 2-подушка накладная
 3-сиденье
 4-судно подкладное
 5-рама

6-опора
 7-штанга
 8-ручка
 9-спинка


Рисунок 1. Кресло-стул СР154. Общий вид

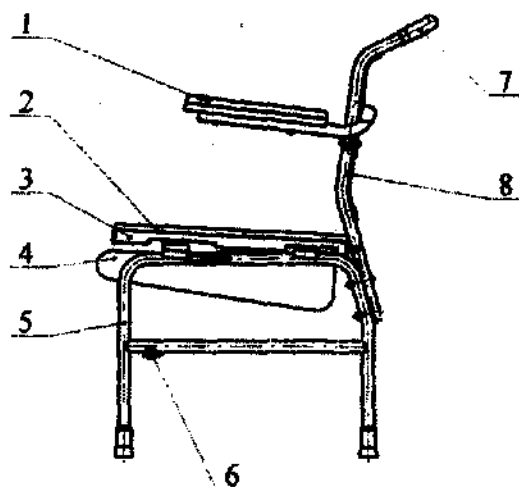

1-подлокотник
2-подушка накладная
3-сиденье
4-судно подкладное


5-рама
6-штанга
7-ручка
8-спинка

Рисунок 2. Кресло-стул СР154-01. Общий вид

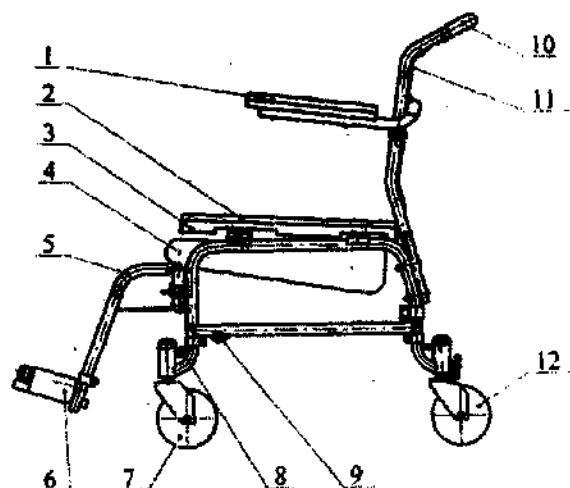


- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1-подлокотник | 7-переднее колесо |
| 2-подушка накладная | 8-опорный ремень для ног |
| 3-сиденье | 9-штанга |
| 4-судно-подкладное | 10-ручка |
| 5-подножка | 11-спинка |
| 6-опора для ног | 12-колесо с тормозом |

Рисунок 3. Кресло-стул CPI 54-02. Общий вид

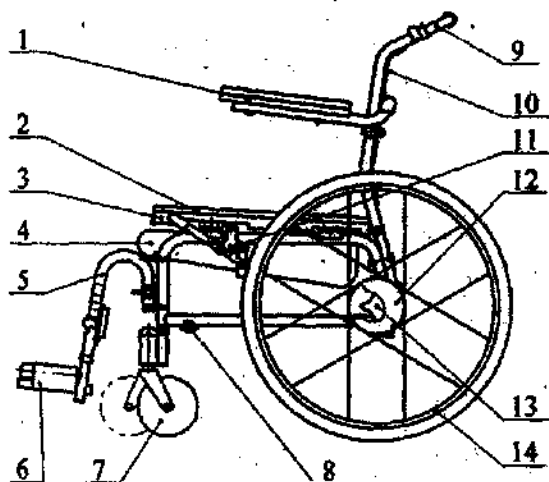

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1-подлокотник | 8-штанга |
| 2-подушка накладная | 9-ручка |
| 3-сиденье | 10-спинка |
| 4-судно подкладное | 11-тормоз |
| 5-полножка | 12-большое колесо |
| 6-опора для ног | 13-рукоятка |
| 7-переднее колесо | 14-колесо |

Рисунок 4. Кресло-стул CP154-03. Общий вид

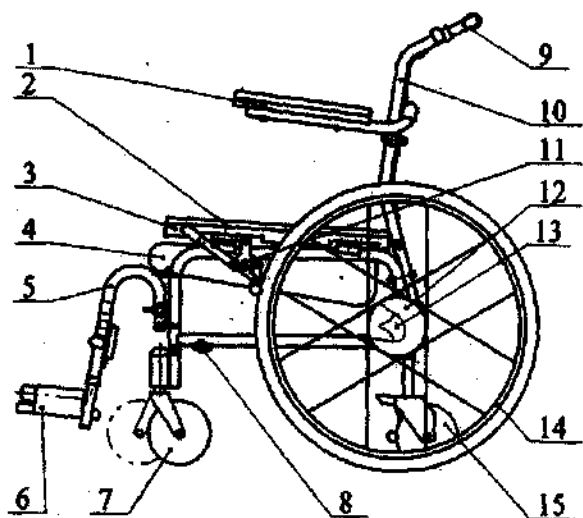

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1-подлокотник | 8-штанга |
| 2-подушка накладная | 9-ручка |
| 3-сиденье | 10-спинка |
| 4-судно подкладное | 11-тормоз |
| 5-подножка | 12-большое колесо |
| 6-опора для ног | 13-рукоятка |
| 7-переднее колесо | 14-колесо |
| | 15-вспомогательное колесо |

Рисунок 5. Кресло-стул СР154-04.Общий вид

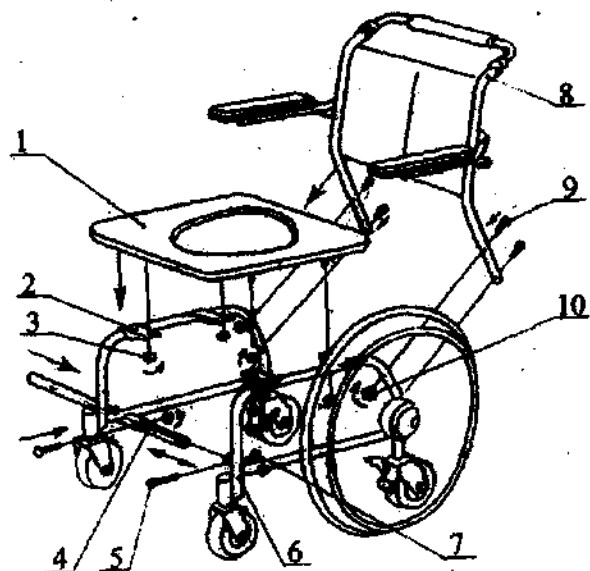
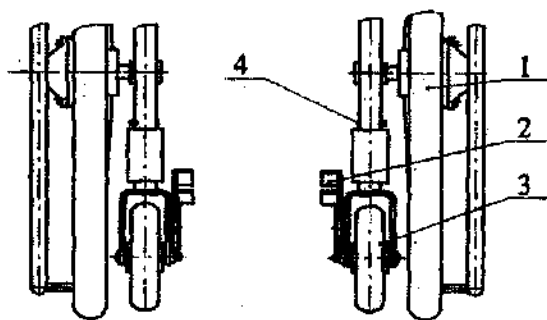


Рисунок 6. Схема сборки кресла-стула



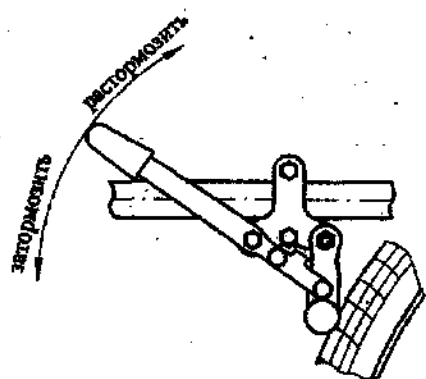


Рисунок 9 - Тормоз большого колеса

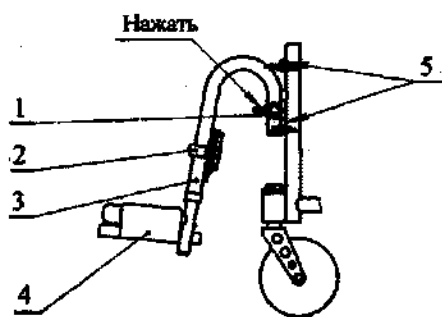


Рисунок 10 - Присоединение подножки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью десять лист.

Подпись [подпись]

