

Костыли опорные и стойки
829;830;832;833;749*

Этикетка
829 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделий

Костыли предназначены для дополнительной опоры при ходьбе людям с ограничениями жизнедеятельности массой до 100 кг.

Костыли, предназначенные для эксплуатации в зимнее время, имеют устройство против скольжения (УПС), снабженное кулачком для открытия и закрытия стержня.

В соответствии с общим назначением костыли делятся: для взрослых, подростков и детей, смотри таблицу А.1 приложения.

Стойка 749 предназначена для замены нижней стойки в костылях деревянных 829; 830 при ремонте и эксплуатации в зимнее время.

1.2 Техническая характеристика

Костыли опорные изготавливаются раздвижными с диапазоном регулирования:

- для взрослых 1190-1365 мм; -- шаг регулирования 35 мм;
- для подростков 980-1155 мм – шаг регулирования 35 мм;
- для детей 828-968 мм – шаг регулирования 35 мм;

1.3 Комплект поставки:**

Костыль деревянный из шпона _____ 1 пара.
обозначение

Стойка деревянная _____ шт.
обозначение

Этикетка 829 ЭТ	1 шт.
-----------------	-------

1.4 Требования по эксплуатации и указания мер безопасности

1.4.1 Подготовка к эксплуатации раздвижных костылей

Раскрутить гайки с винтами на нижней стойке, вынуть винты, раздвинуть костыль до нужной высоты, совместив отверстия на боковых и нижней стойках, зафиксировать это положение винтами с гайками.

Для изменения положения ручки раскрутить гайку, вынуть винт, установить в новое положение ручку, зафиксировав ее винтом с гайкой.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделий с УПС на мраморном и ему подобном полу – УПС следует отключить, так чтобы кулачок занял верхнее положение, а острие стержня спряталось в резиновый наконечник.

2 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

2.1 Средний срок службы – 4 года.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

2.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

2.4 Гарантии изготовителя

2.4.1 Изготовитель гарантирует соответствие костылей требованиям

ТУ 92.9698110.008–93Е, стойки 749 – ТУ 92 9698110006 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

* При заполнении этикетки нужное отметить.

**** Заполняется при упаковывании**



3 Свидетельство о сертификации

Изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-92.

4 Свидетельство о приёмке

4.1 Костыли и стойки изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

М.П. _____ «___» _____ 200 г.

(Подпись лица, ответственного за приемку, штамп ОТК)

Дата продажи _____

(Подпись лица реализующего продукцию)

5 Хранение

Костыли и стойки должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Замечания и предложения по качеству костылей и стоек направляйте по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6
ФГУП «Уфимский ЗМП» Росздора

Приложение А

(обязательное)

Перечень

костылей опорных и стоек

Таблица А.1

Наименование	Обозначение
1 Костыль деревянный из шпона	829
2 Костыль деревянный из шпона с устройством против скольжения	830
3 Костыль деревянный из шпона для подростков	832
4 Костыль деревянный из шпона для детей	833
5 Стойка деревянная с устройством против скольжения	749

Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ 2 лист

Подпись _____

