

Группа Р 22

Утверждаю

Директор ООО «Кормед-Р»



В.И. Кукуев

« 5 » 01 2006 г.

Набор для эстетической обработки зубов
«Эстекор»

Этикетка
002 ЭТ

2006 г

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

1 Назначение

1.1 Набор для эстетической обработки зубов «Эстекор» (далее по тексту набор) предназначенный для снятия зубного налета, отбеливания эмали с последующей ее реминерализацией в составе:

- паста абразивная, шприц вместимостью 2,5 см³ с массой пасты 6 г;
- гель для отбеливания зубной эмали, шприц вместимостью 2,5 см³ с массой геля 3 г;
- гель для реминерализации, шприц вместимостью 2,5 см³ с массой геля 3 г.

1.2 Набор изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от 10 до 35 °С.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	002 ЭТ							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Набор для эстетической обработки зубов «Эстекор»			Лист	Лист	Листов
	Разраб.	Фирсов	3.01.06						A	2	7
	Провер.	Земсков	4.01.06						ООО «КОРМЕД-Р»		
	Н.контр.	Земсков	4.01.06								
	Утверд.	Кукуев	5.01.06								

2 Характеристики (свойства)

2.1 Изготовление набора соответствует данным таблицы 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Обозначение по технологическому регламенту
Набор для эстетической обработки зубов «Эстекор»	002 ЭТ	П 002-011-2005

2.2 Материалы, применяемые при изготовлении пасты и гелей, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование материала		ГОСТ, ТУ	Квалиф. марка
Паста абразивная	Хитозан	ТУ 6-09-05-397-75	Ч
	Глицерин	ГОСТ 6259-75	Ч
	Аэросил	ГОСТ 14922-77	А-300
	Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72	-
	Кислота лимонная	ГОСТ 908-79	ЧДА
	Электрокорунд	ГОСТ 3647-80	М-20, М-40
	Масло мятное	ТУ 9151-002-53909331-2003	-
Гель для отбеливания	Натрий карбометил-целлюлоза	ТУ 6-55-39-90	-
	Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72	-
	Глицерин	ГОСТ 6259-75	Ч
	Аэросил	ГОСТ 14922-77	А-300
	Гидроперит	РС 42-1507-12	-
	Кальция хлорид	ТУ 6-09-4711-81	Ч
Гель для реминерализации	Альгинат натрия	ТУ 15-02-544-83	пищевой
	Глицерин	ГОСТ 6259-75	Ч
	Аэросил	ГОСТ 14922-77	А-300
	Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72	-
	Натрий фтористый	ГОСТ 4463-76	Ч
	Калий фосфорнокислый однозамещенный	ГОСТ 4198-75	Ч
	Хлоргексидин.	Р.У. Р№000734/01-2001	-
	Метиленовая синь	ТУ 6-09-2044-77	Ч
	Масло мятное	ТУ 9151-002-53909331	-

Име. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № подл.						002 ЭТ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							3

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт	Примечание
Шприц	3	Набор может поставляться в розницу или в другой комплектации по требованию заказчика.
Упаковочная тара	1	Картонная коробка
<u>Эксплуатационная документация</u> Этикетка	1	Наклеивается на упаковочную тару

4 Подготовка к работе и рекомендации по использованию.

В зависимости от вида зубных отложений нанести на выбранный диск небольшое количество пасты, равномерно распределить пасту на поверхности диска, обработать зуб при скорости вращения диска не более 2000 об/мин.

После обработки сполоснуть рот водой.

При применении гели для отбеливания и реминерализации предварительно очистить механически поверхность зуба, нанести тонким слоем гель отбеливающий. Продолжительность процедуры отбеливания 3-5 минут.

Промыть зуб водой. Нанести тонким слоем на поверхность отбеленных зубов (не высушивая) гель реминерализующий.

На поверхности зуба образуется пленка, которую не требуется смывать.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Набор соответствует техническим условиям
ТУ 9391-002-75926341-2006 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата изготовления
подпись лиц ответственных
за приемку

Примечание форму
заполняет предприятие-изготовитель.

[illegible]

6.1 Набор упакован

согласно требованиям предусмотренной конструкторской документацией

дата упаковки

упаковывание произвел

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий ТУ 9391-002-75926241-2006 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения упакованного набора со дня изготовления, до ввода его в эксплуатацию должен быть не менее трех лет.

8 Правила хранения

8.1 Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях.

8.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать следующим:

- интервал температур от -50 °C до +40 °C
- относительная влажность воздуха не более 98 % при 25 °C

9 Свидетельство о рекламациях

9.1 В случае обнаружения дефектов на наборе с пастой и гелями или некомплектности при первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

1. Заявку на замену набора с пастой и гелями с указанием адреса потребителя и номер телефона;
2. Дефектную ведомость;
3. Копию свидетельства о приемке и об упаковывании.

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	002 ЭТ	Лист 7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		